


お客様からご好評のAT-Cシリーズの新ラインナップ

伸縮手すりタイプ

AT-C-930よりも +12cm


最小80cm ~ 最大105cm まで
無段階で伸縮可能なので
様々なシーンに対応できます

■ 設置も簡単！

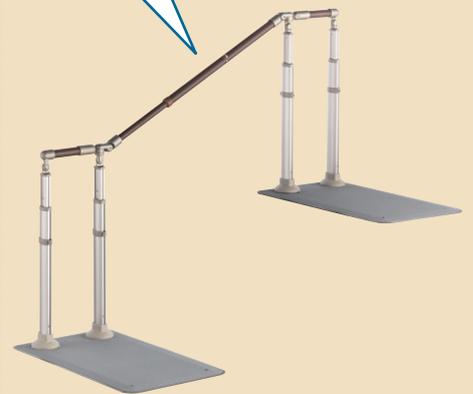


AT-C-E1050なら、こんなメリットも!!

AT-C-930の場合、階段3段では手すりを真っすぐにしか設置できませんでした。

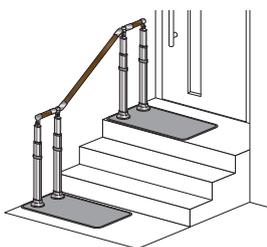

+12cm伸びたので、階段3段でも手すりの角度を振って設置できます。

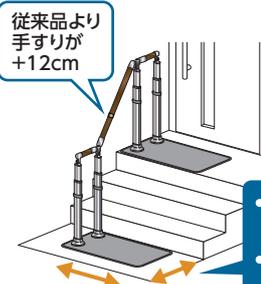

- 伸びた分、横にずらして角度をつけられます。
- 手すりを仮固定のまま位置調整が行えます。

事例



リフォーム:約5年
階段奥行:60cm
豪雪地域のため風除室前に設置


240 ベランダや縁側に



630 狭い玄関や
小さい段差に



930 ポーチ部や玄関に

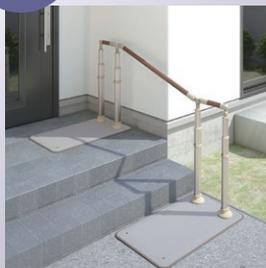

E1050 3段階など
長いアプローチに



NEW

仕様



	AT-C-240	AT-C-240T	AT-C-630	AT-C-630T	AT-C-930	AT-C-930T	AT-C-E1050	AT-C-E1050T
価格	110,000円(税抜)	160,000円(税抜)	220,000円(税抜)	320,000円(税抜)	220,000円(税抜)	320,000円(税抜)	245,000円(税抜)	370,000円(税抜)
商品コード	870-140	870-141	870-142	870-143	870-130	870-131	870-150	870-151
TAIS	00221-000542	00221-000543	00221-000544	00221-000545	00221-000500	00221-000501	00221-000553	00221-000554
JAN	49-70210-00119-6	49-70210-00120-2	49-70210-00121-9	49-70210-00122-6	49-70210-85445-7	49-70210-85446-4	49-70210-00756-3	49-70210-00757-0
梱包入数	1	1	1	1	1	1	1	1
重量	約19kg	約22kg	約39kg	約47kg	約39kg	約48kg	約39kg	約48kg
最大設置高さ	—	—	30cm	30cm	45cm	45cm	45cm	45cm
接続部の手すり長さ	—	—	63cm	63cm	93cm	93cm	80~105cm	80~105cm

240


240T

630/930/E1050


630T/930T/E1050T

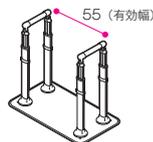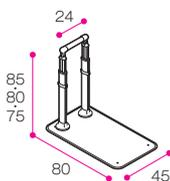

ベースプレート高さ：1.4

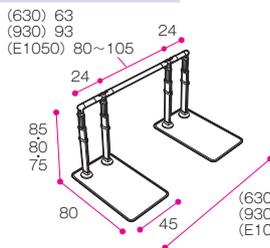

(630) 132
(930) 163
(E1050) 150~175

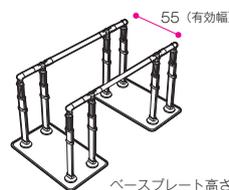

ベースプレート高さ：1.4

※手すり φ3.4、
E1050の細手すりはφ3
E1050の太手すりはφ3.6

(単位：cm)

最大使用者
体重
100kg

部 品 名	材 質
手すり	ウッドパウダー混合半硬質樹脂/アルミニウム
外支柱、スライド支柱	アルミニウム
ベースプレート、固定プレート	ステンレス
高さ調節固定ピン	ポリエチレン/ステンレス
支柱キャップ	AES樹脂

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品


部 品 名	材 質
エンド支柱ブラケット	
可変支柱ブラケット(可動部・丸棒可動部)	アルミ合金
可変支柱ブラケット(回転部 上・下)	
滑り止めシートKA(大、小丸)	(表面)発泡ウレタンゴム (接着面)アクリル系接着剤
端末保護カバー	塩化ビニル樹脂
その他 樹脂部	ポリプロピレン、ASA樹脂

設置条件

630/630T、930/930T、E1050/E1050T


- 平坦な場所に設置する場合
※斜面に設置しないでください。

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T) 42cm 目安
(930/930T) 73cm 目安
(E1050/E1050T) 60~85cm 目安

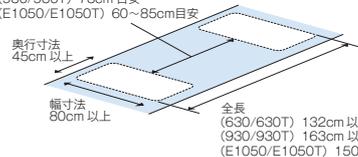


- 段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T) 段差高さ30cmの場合：42cm 目安
(930/930T) 段差高さ45cmの場合：73cm 目安
(E1050/E1050T) 段差高さ45cmの場合：60~85cm 目安

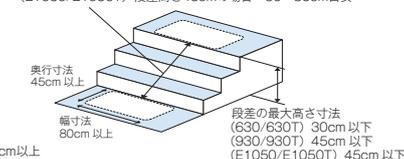


手すりの角度は45°以内に
納まるように設置してください。
・2枚のベースプレートは
平行になるように設置して
ください。

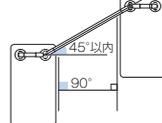

共通

ベースプレートよりも小さい縁石や
凹凸が大きい床面、芝生、滑りやす
い床面の上には設置できません。

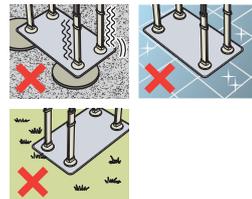

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…