

あんじゅ
安寿

歩行車 イコットエア

icottoair

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

歩行車
最軽量

クラス

驚きの

3.9kg

行きたい場所へ思いのままに。
世界が広がる「軽さ」です。



ARONKASEI CO., LTD.

「もっと外出したい」
その気持ちに新しい一歩を。

ultra light
超軽量

「かるさ」を味方に、
快適にどこへでも！



高齢者の方の多くは外出したい気持ちを持っていますが、
加齢とともに困難を感じる方が増えていることがわかります。

DATA


■外出の希望

75~79歳の男女 n=625

外出したい **62.4%**

■外出時の障害


75~79歳の男女 n=625

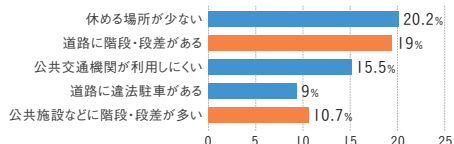

■日常の行動での困難の程度

(少し重い物を持ち上げる、運ぶ)

60歳以上の男女 n=3,893

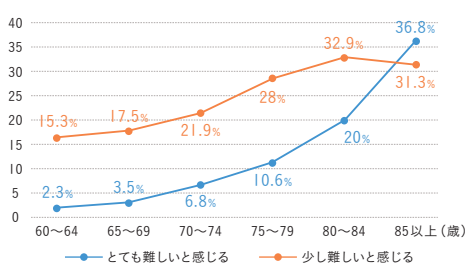

内閣府 高齢者の日常生活に関する意識調査(平成26年度)

従来の歩行車の問題点

◎歩行車が重たい、操作が複雑



◎屋外は段差が多くて歩行が不安



easy
簡単

分かりやすい操作で
「できる」を自信に！



イコットエアの「できる！」ポイント

超軽量

歩行時の安心感がありながら、軽くてさまざまな場面で持ち上げが楽になり、いままで不安だった外出が、安心して行えます。

簡単

歩行車に必要な機能が手元で操作できます。手元に機能がまとまっているため、ひざを大きく曲げずに操作することができます。




階段、ポーチ部などの移動時


女性でも
ラクラク！

「楽らくグリップ」を持つことで、歩行車がバランスよく持ち上がり、さらに軽く感じます。


楽らくグリップ

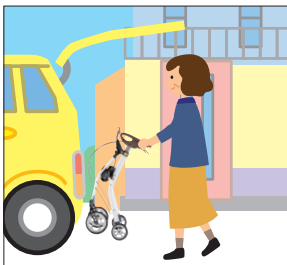

車への積み込み時

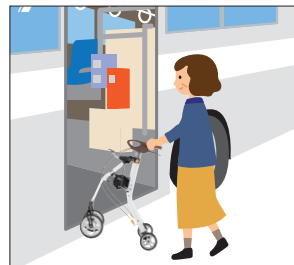

公共交通機関の利用時

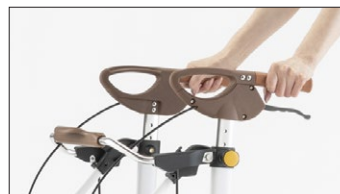

動かす

ハンドルグリップをしっかり握って歩行車の操作ができます。



止める

歩行車を操作しながらしっかり握れるブレーキレバー。後輪を動かさないようにする駐車ロックはブレーキレバーを下げるだけで行うことができます。

駐車ロック時

ブレーキレバー



折りたたむ

手元で操作できる折りたたみレバーでひざを大きく曲げずに片手で開閉動作を行うことができます。

折りたたみレバー

軽さと強さを両立させた構造

軽量なのに安心の使い心地を両立させた極限構造。
部品の形状をとことんシンプルに、部品点数も徹底的に無駄を排除しながら、安心の使い心地を実現するために、重要な箇所はアルミ素材や高強度樹脂を採用し、強度と軽量化を両立させています。



すべては快適なお出かけのために

ちょっと一息 座面つき

歩くのに疲れたら座面に座って休憩できます。



足元が見える メッシュタイプ

メッシュ状の座面で足元が確認しやすく、中に入れた荷物も忘れません。



小物入れに 座面バッグ

外出時の荷物入れに。バッグ容量：約2.5リットル



お買い物もできる 袋フック

買い物の荷物が入った袋もフックに引っ掛けて歩くことができます。



体格にあわせて 高さ調節

歩きやすい高さにハンドルグリップを調節できます。ハンドル高さ：80～92.5cm (6段階)




片手でセット 杖ホルダー

杖を歩行車にセットできます。立てかけるだけで固定できるので片手でハンドルを持ちながらセットできます。



〔寸法図〕

(単位：cm)

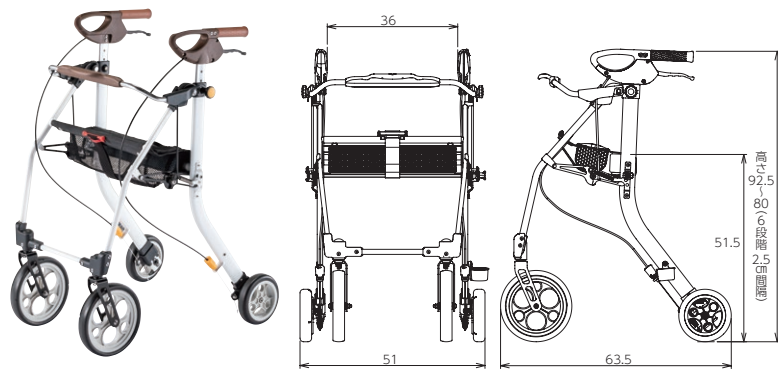

歩行車 イコットエア

価格	58,000円(税抜)
商品コード	532-330
商品サイズ	幅51×奥行63.5×高さ80～92.5cm (6段階) 座面高さ：51.5cm
商品重量	約3.9kg
バッグ載荷重	6kg未満(容量 約2.5L)
材質	(フレーム)アルミニウム (タイヤ)EVA樹脂 (ハンドルグリップ)エラストマー (座面バッグ)ポリエステル、ナイロン (折りたたみレバー、杖ホルダー上/下) ポリプロピレン
梱包入数	1
色調	ホワイト
J A N	49-70210-007112
T A I S	00221-000552

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与/
介護予防福祉用具貸与対象品



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…