

あんじゅ
安寿



ポータブルトイレ
ジャスピタ
SERIES



ポータブルトイレの新しいカタチ。
ドルフィンカットがあなたを導く。

選べる機能

標準
便座

ソフト
便座

暖房
便座


快適
脱臭

ARONKASEI CO., LTD.

Jaspita

ジャスピタは、ポータブルトイレでの失敗＝尿こぼれを

ポータブルトイレを使用した排泄での失敗のひとつに『尿こぼれ』があります。

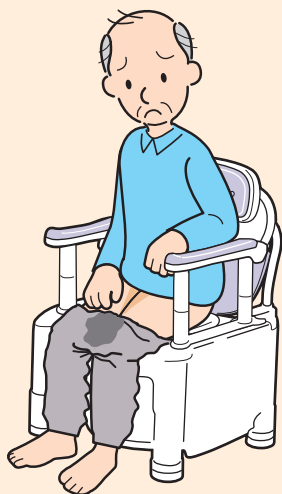


ポータブルトイレ使用中に前方に尿がこぼれてしまうと、着衣・床などを汚してしまい、

使用者本人の自尊心を傷つけてしまうと同時に後始末にかかる介護負担も増えてしまいます。

ポータブルトイレ使用時に尿がこぼれるかとアンケート調査した結果…

ポータブルトイレを使用している方

- ・約70%は尿こぼれを経験しています。
- ・また約17%は頻繁な尿こぼれに直面しています。

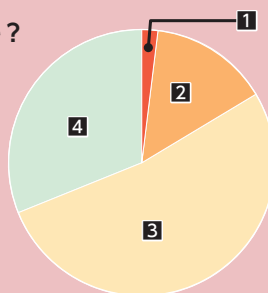

- 1 1.5% いつもこぼれてしまう
- 2 15.5% よくこぼれてしまう
- 3 52.5% あまりこぼれることはない
- 4 30.5% こぼれることはない

(2012年アロン化成調べ)



では、何故『尿こぼれ』が発生するのでしょうか？

➔ **排泄姿勢の崩れが原因です。**

以下のような『排泄姿勢の崩れ』が尿こぼれの原因となります。

浅座り




・ふくらはぎがトイレ前端にあたり深く座れない。

ななめ座り



・弱視の方などがトイレの中心がわかりにくく、ななめに座ってしまう。

股閉じ座り

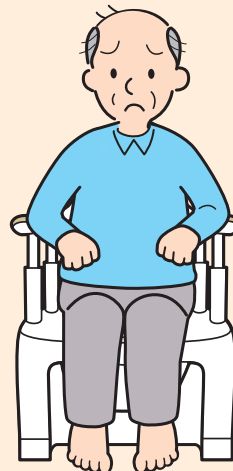

・股を閉じるクセがある。

・ ジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。

防止する、『理想的な排泄姿勢』にあなたを導きます

ポータブルトイレ ジャスピタ



●● 排泄姿勢の崩れを防ぐ 『ドルフィンカット』



『安寿』独自！イルカの口先の様な形状
『ドルフィンカット』が
理想的な排泄姿勢に導きます。


左右がくぼんだ前面形状




脚が開きやすくなる山形状




ジャスピタならば

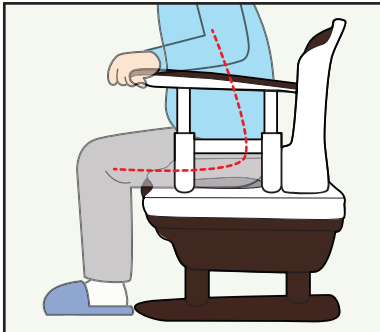

左右がくぼんだ前面形状でしっかりと深く座りやすいので『浅座り』を防ぐ効果を期待できます。

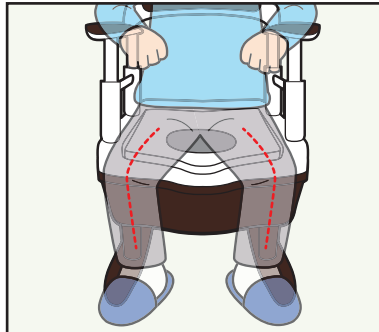

トイレ先端のふくらみで中心位置がわかりやすくまっすぐ座りやすいので『ななめ座り』防止が期待できます。

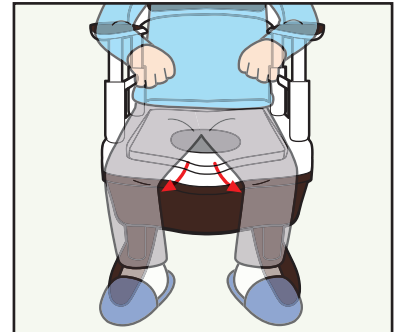

股を開いた姿勢を自然に誘導する便座で『股閉じ座り』の防止が期待できます。


ドルフィンカットが導く理想的な排泄姿勢

1

便座の適切な位置まで
しっかり深く座る。

2

やや前傾になる。

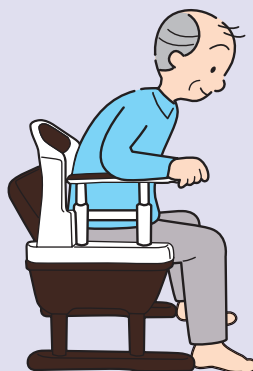

3

便座中央に体の中心を
あわせて座る。

4

軽く股をひらいて座る。




使用者に合わせる事で、動作・姿勢を助ける

ひじ掛け・便座の調節

使用者の体格・身体状況に合わせ、ひじ掛け高さ・便座高さ・便座角度の調節が可能です。

ひじ掛け高さは18~30cmで調節できます

排泄中に前傾姿勢を保つためには高めの設定がオススメ。

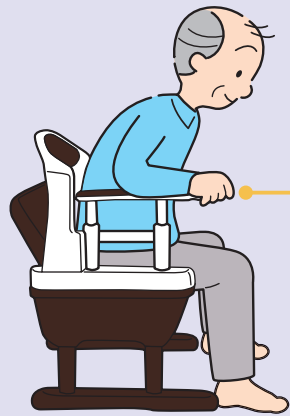

ひじ掛けを高めにするると前腕で身体を支えやすいです。

着座動作が楽。



ひじ掛けはワンタッチで調節可。



ひじ掛けを外せば座位移乗に便利。

便座高さは33~45cmで調節できます

便座の高さが低すぎると立ち上がりがしにくく、高すぎると排泄がしにくい。

→ 使用者が使いやすい高さに調節が可能。

目安：下腿長に合わせる。



下腿長
||
足の裏から
膝裏までの長さ

膝を直角に曲げて
すわった際に
足の裏の全面が
床につきます。



ドルフィンカットは左右がくぼんでいるので脚が引きやすく、立ち上がりがしやすいです。



便座角度を3°前傾と
水平の2段階で調節できます



3°前傾がオススメ

・立ち上がり動作を優先される方



・前傾姿勢を優先される方




水平がオススメ

・座位で移乗する方



・姿勢保持が不安な方

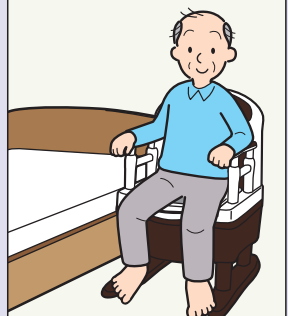

ポータブルトイレを使う上で不安な、『日々のお手入れ』を楽にする。


失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板

ジャスピタはドルフィンカットに加えて、失敗を防止する工夫が施されています。

Point 1 尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】


■従来のポータブルトイレは

便座とバケツの間にすきまがあり尿が前にこぼれる事があります。

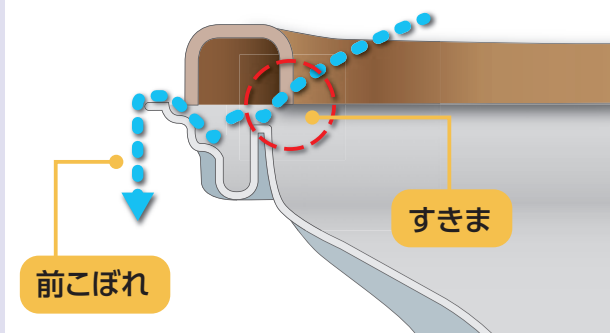

■ジャスピタならば


【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。

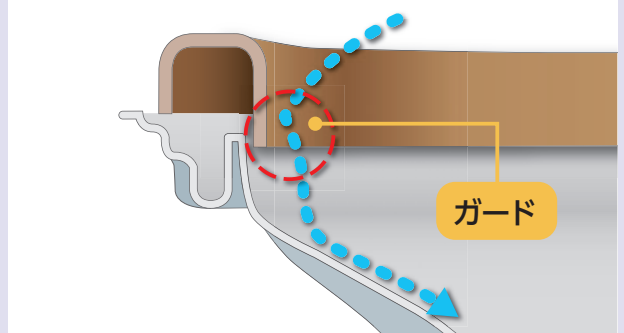

Point 2 閉まっているのが判りやすい 便座とバケツ蓋のコントラストデザイン


■従来のポータブルトイレは

便座とバケツの蓋が同色だったので蓋が閉まっている事に気が付かず用を足してしまう事も...

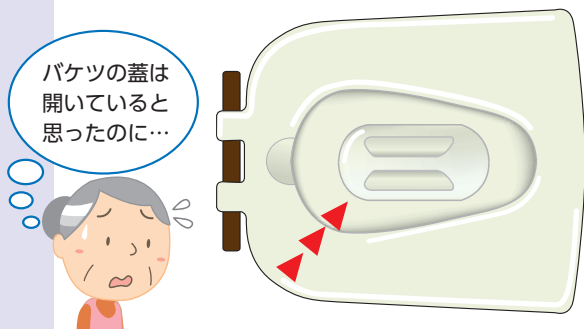

■ジャスピタならば

バケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。

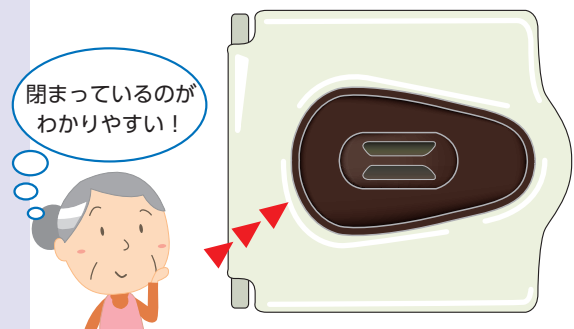

Point 3 着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単

バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。

受け板は取り外せるのでお手入れ簡単。



受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。

2重の安心構造





ポータブルトイレ発売40年。これまでアロン化成ならではの、ささや

お客様の声


1

「ポータブルトイレのバケツには、2ℓの水を入れて使用」というのが一般的だけど…


2ℓも入れるとバケツが重くなるし、水が勿体無い。

ジャスピタは!

新型節水バケツを採用。
1ℓの水で従来通り汚物をカバー。

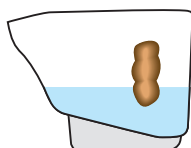


● 大便が入ったら…

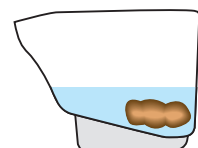

● 水が深いところにおさまります

水2ℓ = 2kg /

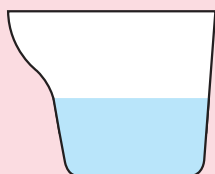

重いなあ…

水も勿体無いし…

お客様の声

2

ポータブルトイレのバケツに蓋をしようとする、便座を持ち上げなければいけない…

これでは、使用者本人では出来ない。

ジャスピタは!

便座穴にもフィットするバケツ蓋を作りました。



● この出っ張りが入り込み代になって…



● 便座の上から、しっかり蓋が出来て、におい対策になります。

自分で便座を上げてバケツの蓋を開けるのは難しい。

でも、蓋を閉めないとにおいが気になる…

お客様の声

3

バケツの柄をつかもうとすると…

受け板に手が触れるのが気になる。

ジャスピタは!

バケツの柄を受ける突起を受け板につけました。



● 受け板に手を触れずに、柄をつかむ事が出来ます。



バケツを取り出すとき、柄をつかもうとすると、尿などで汚れた受け板に手がつくのが、嫌だ。

お寄せ頂いた御要望にお応えする、 かな新機能がいっぱいです。



お客様の声

4

上蓋が邪魔になる事がある…

簡単に取り外し出来れば良いのに。



ジャスピタは!

上蓋が簡単に取れる構造です。



お客様の声

5

バケツに水を張る時…

目安のラインが見えにくいです!



ジャスピタは!

バケツに目安線がはっきりと入っているのわかりやすいです。




ここまで

もちろん! 基本スペックも充実

1 省スペースで設置できる

[全幅49.5cmのコンパクトボディ]

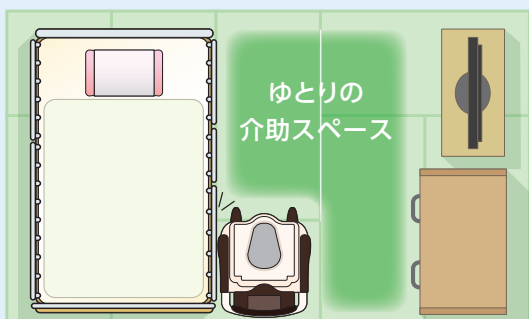

ベッド・家具と一緒ににおいても使用スペースを確保。

2 移動に便利

[キャスター標準装備]



ちょっとした移動に便利なキャスター付き。

商品名	標準便座	ソフト便座	暖房便座	標準便座・快適脱臭	ソフト便座・快適脱臭	暖房便座・快適脱臭
商品コード	533-900	533-901	533-902	533-903	533-904	533-905
JAN	4970210843635	4970210843642	4970210843659	4970210843666	4970210843680	4970210843697
TAIS	00221-000453	—	—	—	—	—
メーカー希望小売り価格	31,000円(税抜)	37,000円(税抜)	46,500円(税抜)	54,000円(税抜)	60,000円(税抜)	69,000円(税抜)
容量	節水型ポータブルトイレ用バケツ:約9リットル					
製品寸法 幅×奥行×高さ(cm)	49.5×60×73~85					
重量(kg)	10.9	11.0	11.6	11.6	11.7	12.3
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)	51×63×49					
梱包重量(kg)	13.6	13.6	14.5	14.3	14.3	15.2
入数	1					
材質	本体:ポリプロピレン ひび掛け・脚部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂 脚ゴム:エラストマー ソフト便座…(ソフト便座) 発泡EVA樹脂					
付属品	専用便座カバー1枚、 消臭シート(試供品)	消臭シート(試供品)	専用便座カバー1枚、 消臭剤フォームタイプ	消臭剤フォームタイプ		

※組立式




最大使用者体重 **100kg**



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※標準便座のみ

■商品寸法図 単位:cm

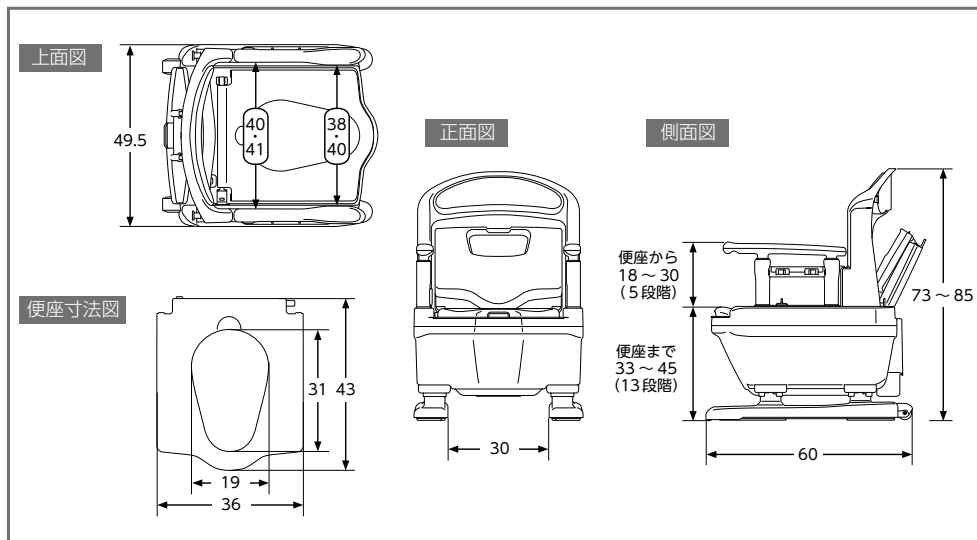

■製造元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

[商品のお求め・ご相談は・・・]