

安寿 あんじゅ

歩行車 リトルターン
電動アシスト付

LITTLE TURN



道路の傾斜や歩行速度を自動で感知し、自動アシスト、自動制御。利用者に寄り添う、先進的な歩行車です。



小回りがきく!

電動アシスト機能で
坂道でも快適な歩行に



ロボット
搭載

人気の「リトルターン」に
新しい仲間が増えました!

リトルターン 電動アシスト付
解説ビデオ公開中!



ARONKASEI CO., LTD.

電動アシストでらくらく歩行♪



平地

歩きたい速度で
移動できる

車輪の回転方向とトルク量を常に感知し、自動で走行速度を調整します。

上り坂

らくらく歩行車を
押せる

勾配角度を感知し、自動で「上り坂モード」に変更。モーターのアシストで楽に坂道を歩けます。

下り坂

自動で減速

勾配角度を感知し、自動で「下り坂モード」に変更。自動ブレーキでゆっくりと安心して歩けます。

使い勝手を追求した電動アシストユニット

シンプルでわかりやすい
アシスト力設定(3段階)




身体状況に応じて、
3段階の速度切替えができます。

使い方、危険な場所を
音声でもアシスト



電動アシストと音声案内で
歩行が安心して行えます。

バッテリー長持ち
充電しやすいパック式

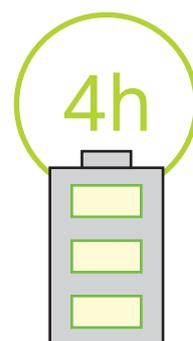

約4時間連続使用ができるので、
普段の外出時でも安心です。

危険を察知して自動制御。 安全にも配慮。



傾いた道

まっすぐ歩ける

傾斜角度を感知し、自動で「片流れ防止モード」に変更。独立2輪駆動で直進性を高めます。



急加速時

自動ブレーキがかかる

急な加速を感知したときは、自動でブレーキをかけて転倒を防止。



手を離れたとき

自動停止


グリップを握っているかを感知し、手が離れると自動でブレーキがかかります。「両手で正しく握っている」を高い精度で検知(把持検出機能)。

取り扱いしやすい本体設計

最小回転幅
約80cm

狭い空間でも扱いやすい
小回りの良い本体設計

本体幅、ホイールベース(前輪と後輪の長さ)が小さいので小回りがききます。

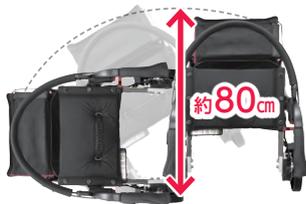

折りたたみ幅
30cm

コンパクトに
収納できる
左右折りたたみ
構造

折りたたんだ
後も自立します。



軽量
約9.1kg

電動アシスト機能付きタイプ
では軽量クラス
取り扱いしやすい

軽量設計でちょっとした
段差も楽に持ち上げられ
ます。また大きな車輪で、
凹凸のある道も楽に乗り
越えられます。



バッグ容量
12ℓ

大容量



重たい水もOK(耐荷重6kg未満) 座面付きで休憩できます。

こんな方にオススメです！ - 電動アシスト歩行車の利用により期待できる効果 -

自宅周辺に坂道が多く
外出の障壁となっている方

角度感知機能がサポート

上りはモーターによるアシストで楽に、下りは自動ブレーキでゆっくり進むことができます。



外出頻度の向上による
QOLの改善が期待できます。

平衡感覚が取りにくく
まっすぐ歩くことが困難な方

片流れ防止機能がサポート

直進性を高めることによって、安定して歩くことができ、転倒リスクが減少します。



付き添い・見守り等の
介助負担も軽減できます。

家族の見守りを受けながら
外出することがある方

抑速・片流れ防止機能がサポート

在宅に戻った際、リハビリ専門職がいなくても家族が付き添うだけで歩行機会を作り出すことができます。





家族の介助や見守りの負担軽減、
外出頻度の向上によるQOL改善に。



〔商品寸法図〕

(単位: cm)

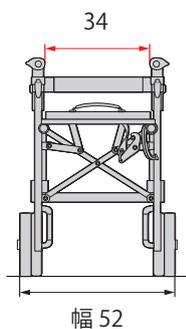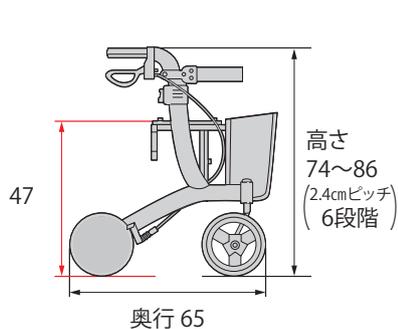

歩行車 リトルターン 電動アシスト付

価 格	220,000円(税抜)
商品コード	532-319
商品サイズ	幅52×奥行65×高さ74~86cm 座面高: 47cm 折りたたみ幅: 30cm
商品重量	約9.1kg
材 質	(座面・バッグ) ポリエステル (フレーム) アルミニウム (ハンドルグリップ) エラストマー (タイヤ) 前輪: EVA樹脂、後輪: エラストマー
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属) 連続使用時間: 約4時間 充電時間: 約3時間 電池サイクル寿命: 約300回
梱包入数	1
バッグ載荷重	6kg未満(容量約12リットル)
座面耐荷重	100kg
色 調	ワインレッド
J A N	49-70210-00462-3
T A I S	00221-000547

※付属品: 杖固定ベルト、杖ホルダー、専用充電器

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…