

安 あんじゅ 寿

アットグリップ トイレサポート  
H-S / H-T / HN-T / N-S / N-T

ATTOGRIP  
アットグリップ

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

どんな便器にも  
トイレ環境にも置ける  
「置くだけ」タイプ



ATTOGRIP  
アットグリップ  
トイレサポートシリーズ ラインナップ



H-S 片側はねあげ



H-T 両側はねあげ



HN-T 片側はねあげ/  
片側ノーマル



N-S 片側ノーマル



N-T 両側ノーマル


ARONKASEI CO., LTD.

高い安定性を保ちつつ、  
置くだけ簡単な  
シンプル構造



## 1 置くだけ設置！

便器の前に据え置く構造なので、  
便器の形状や材質の影響を受けず  
どんなトイレ環境にも設置できます。

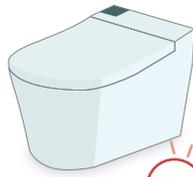

樹脂製便器



壁付/タンクレス便器



特殊形状便器

## 2 多彩なひじ掛け設定で 様々なトイレ環境 身体状況 にフィット

### ① ひじ掛けを選べます



はねあげ  
タイプ

- 横からのアプローチに。
- 介助の動線確保に。



ノーマル  
タイプ

- 正面からのアプローチに。

### ② 手すりの位置を前後左右に調節できます

#### 左右調節（ひじ掛け内寸）

支柱を180度回転させることで  
ひじ掛け内寸を調節できます。



狭  
座位保持に  
43cm



広  
ゆったり  
48cm

ペーパーホルダー  
や温水洗浄便座の  
リモコンも回避で  
きます。

※片側の支柱だけを外側に取り付けることもできます

#### 前後調節

支柱の固定位置を変えることで  
前後に調節できます。



ベーシック




ベーシック  
よりも+8cm

前方に手を置ける  
ので、立ち上がり  
姿勢（前傾）が  
より安定します。

※便器先端からひじ掛け先端までの距離

### ③ 高さ調節ができます

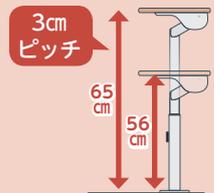

体格に合わせて調節できます。

### ④ 片ひじ掛けも選べます



障害物がある場合や、身体状況  
に応じて片ひじ掛けも選べます。



### 3 尿臭染み付きを防止！

耐蝕コーティングされた「ベースプレート」とベースプレート全面を覆う「洗えるマット」で尿臭染み付きを防止します。




### 4 設置は簡単！あっという間に完了

支柱の取り付け



支柱は上から簡単に固定でき、ベースプレートを裏返す必要がありません。

ひじ掛け高さ調節

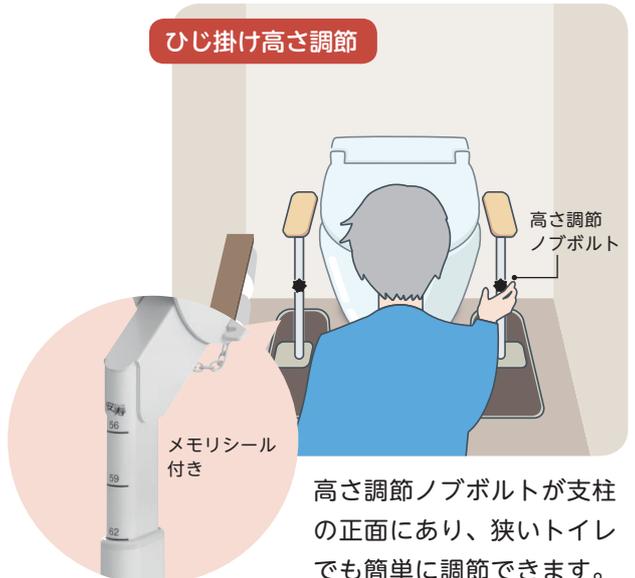

高さ調節ノブボルトが支柱の正面にあり、狭いトイレでも簡単に調節できます。

仕様

H…はねあげ N…ノーマル(固定) / S…シングル(片ひじ) T…ツイン(両ひじ)

商品名	トイレサポート H-S	トイレサポート H-T	トイレサポート HN-T	トイレサポート N-S	トイレサポート N-T
ひじ掛けタイプ	片側はねあげ	両側はねあげ	片側はねあげ/片側ノーマル	片側ノーマル	両側ノーマル
	ひじ掛けは左右付け替え可能		ひじ掛けは左右付け替え可能	ひじ掛けは左右付け替え可能	
価格(税抜)	55,000円	69,000円	64,000円	50,000円	59,000円
商品コード	870-087	870-088	870-089	870-090	870-091
TAIS	000577	000578	000579	000580	000581
JAN	03200-8	03209-1	03210-7	03211-4	03212-1
重量	約11.8kg	約14.6kg	約13.9kg	約11.0kg	約13.1kg
ひじ掛け内寸	-	48cm/43cm	48cm/43cm	-	48cm/43cm
材質	(木製ひじ掛け)ラバーウッド無垢材 / (支柱・ベースプレート)スチール / (支柱カバー)ポリエチレン / (専用マット)ポリエステル、ポリウレタン				
選定の目安	<b>はねあげタイプ</b> 横アプローチや、介助スペースの動線確保に。	<b>はねあげタイプ</b> 横アプローチや、介助スペースの動線確保に。	<b>はねあげタイプ</b> 横アプローチや、介助スペースの動線確保に。	<b>ノーマルタイプ</b> 正面からのアプローチに。	<b>ノーマルタイプ</b> 正面からのアプローチに。
	<b>片ひじタイプ</b> 片ひじでスッキリ	<b>両ひじタイプ</b> 両ひじでしっかり姿勢保持	<b>両ひじタイプ</b> 両ひじでしっかり姿勢保持	<b>片ひじタイプ</b> 片ひじでスッキリ	<b>両ひじタイプ</b> 両ひじでしっかり姿勢保持


※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。  
TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与 / 介護予防福祉用具貸与対象品

商品寸法図

単位: cm

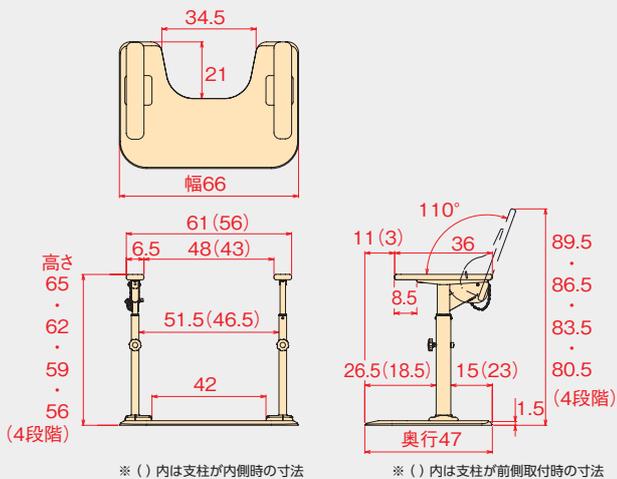

ひじ掛けノーマルタイプの寸法は、はねあげタイプと同じです(はねあげ時の高さを除く)。

従来品との使い分け

トイレ環境や身体状況から選択してください。

アットグリップ  
トイレサポートシリーズ

便器を選ばない  
据え置きタイプ



洋式トイレ用フレーム  
はねあげR-2シリーズ

横荷重に強い  
便器固定タイプ



高さ調節ノブボルトが支柱の正面にあり、狭いトイレでも簡単に調節できます。



メモリシール付きです。



高さ調節ノブボルトは側面にあります。



目印線が入っています。



ひじ掛けストッパーを収納できるようになりました。



ひじ掛けストッパーを使わないときは右図のように見えています。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7101  
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040  
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのそく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…