

**安**あんじゅ  
**寿**

ユニットバス対応浴槽手すり  
UST-130UB

楽つけ  
シリーズ

今まで取り付けできなかった  
ユニットバス対応の浴槽手すり。

浴槽への出入りも安全にサポートします。

ユニットバスに  
取り付けできる

洗い場を  
ひろびろ使える

ARONKASEI CO., LTD.


**SIAA**  
防カビ加工

# これからはエプロン式ユニットバスにも 浴槽手すりが設置可能に！


さらに

## 洗い場への出っ張りを抑えた 省スペース設計

脚付き手すりの  
よくある困りごと

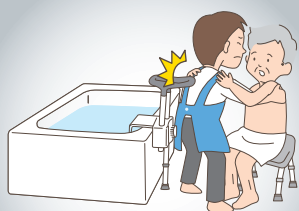

グリップが出っ張り、  
介助動作の邪魔になる。

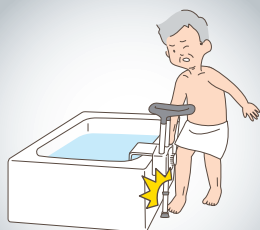


脚の出っ張りが大きいと  
利用者の脚が引っかかり、  
つまづく不安がある。

洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。


13.5cm

グリップの出っ張りが小さく  
介助動作の邪魔になりません。

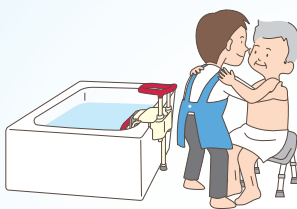

8cm

脚の出っ張りが小さく  
利用者の脚をひっかきにくく安心です。

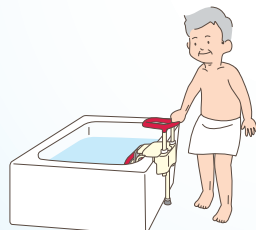


洗い場側

浴槽内


シャワーベンチ  
使用時

体や頭を洗うときにも  
邪魔になりません。

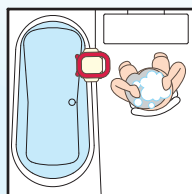

扉の開閉時


扉の開閉時に  
当たりません。

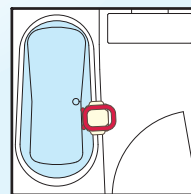

## 動作補助に最適なループ形状グリップ




浴槽の出入り

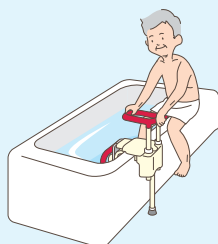


両手でしっかりと握ることができるので、安定した状態で浴槽の出入りができます。

立ち座り

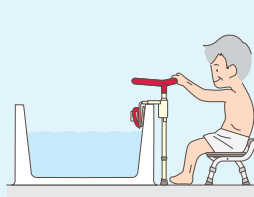

握りやすい位置にグリップがあるので、イスへ座ったり、立ったりするのも安定して行えます。

浴槽内の姿勢保持

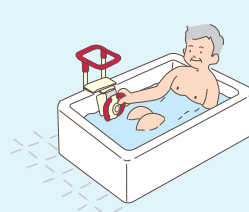


握りやすいリング形状の内グリップを、浴槽内で手が届きやすい位置に設置しています。

## 調節もカンタン

### グリップの高さを、カンタンに調節可能。

つまみをつまんで、グリップを上下にスライドさせるだけ。工具も不要で、カンタンに高さを調節できます。

工具  
不要

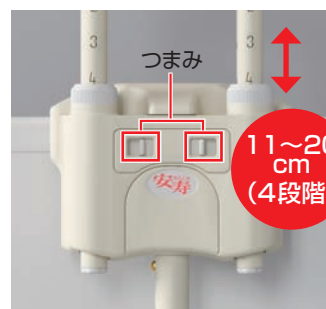


### 浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。

脚パイプはプッシュボタンで簡単調節。脚ゴムはアジャスター付で床にしっかり突っ張り、安定性を向上させます。


工具  
不要

アジャスター付の脚ゴムは手でカンタンに調節できます。

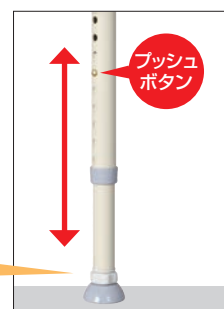

### 浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。

フレーム抜け止めネジで、本体を分離せずに幅調節できます。

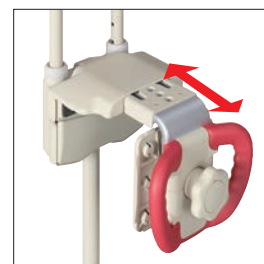


## ユニットバス浴槽にやさしい設計

### 1 浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。

グリップと浴槽壁との距離が小さいので、使用時に浴槽への負荷を抑えます。また、取り付け時に、ハンドルを締め付けてもグリップの位置(洗い場側への出っ張り)は変わりません。



### 2 エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。

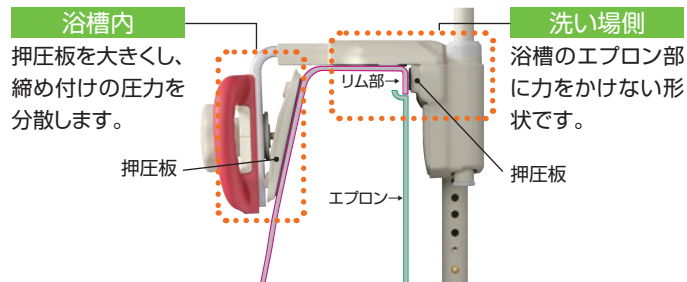

### 3 床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。

浴槽への負荷を小さくするために、脚を設けました。取り付け時のガツツキの防止にも役立ちます。



### 4 トルク制御で浴槽を傷つけずしっかりと固定できます。


ハンドルの締め付けの際、カチッと音が鳴るまで回せば、締め付け不足や過剰な締め付けによる浴槽破損を起こさない適正な力で取り付けができます。



※取り付けできる浴槽、取り付けできない浴槽について、事前に取扱説明書をご確認ください。弊社「安寿」ホームページよりご確認ください。

## 取り付けできる浴槽

浴槽の素材…FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽

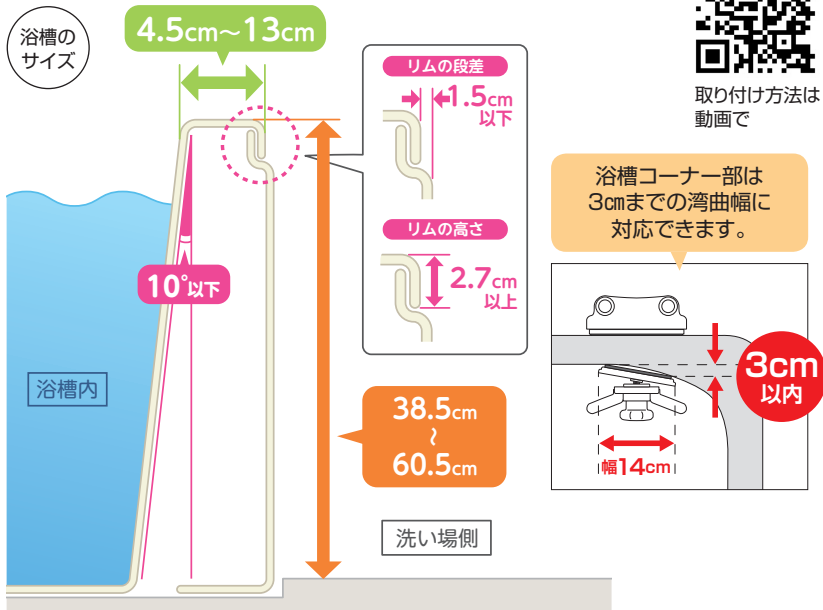

いつも清潔、  
防カビ加工



防カビ加工部位:グリップ部(エラストマー被覆部分)、脚ゴム  
防カビ加工方法:練りこみ

### 【注意事項】

- ・防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- ・防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- ・使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。



### ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB

価 格	30,000円(税抜)
商品コード	[レッド] 536-630 [ブルー] 536-631 [グリーン] 536-632
商品サイズ	幅21×奥行30.5~36.5×高さ49.5~80.5cm グリップ高さ(浴槽上縁から)11・14・17・20cm
商品重量	約4.5kg
材 質	[ハンドル、内グリップ、押圧板、スライドカバー]ポリプロピレン [アジャスター固定ナット]ポリプロピレン ※ナット部分はステンレス [押圧ゴム板]エラストマー [脚ゴム]合成ゴム(防カビ加工) [ゴムシート]合成ゴム [フレーム抜け止めネジ、フレーム固定ネジ、プッシュボタン用パネ、グリップ部、グリップ支柱]ステンレス ※グリップ部はエラストマー被膜(防カビ加工) [可動フレーム、脚パイプ、短管]アルミニウム [本体フレーム]アルミニウム、ポリプロピレン
梱包入数	2
J A N	[レッド] 49-70210-00333-6 [ブルー] 49-70210-00334-3 [グリーン] 49-70210-00335-0


※付属品:六角レンチ

最大使用者体重 80kg

特定福祉用具/特定介護予防福祉用具

### 〔商品寸法図〕

(単位:cm)

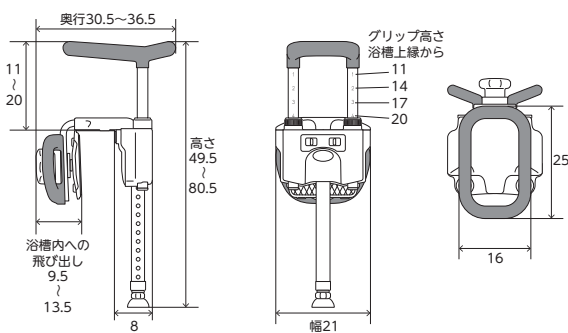

Aron アロン化成株式会社  
ライフサポート事業部

〒1105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

### ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100  
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011  
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

### 製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…