



AT-C-630/630T,930/930Tをご使用者様へモニタリング実施時には、以下の点検をお願いいたします。

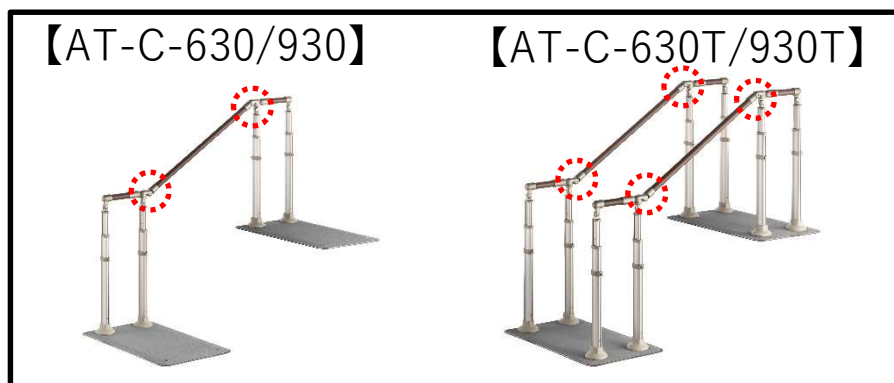


<旧ブラケット>

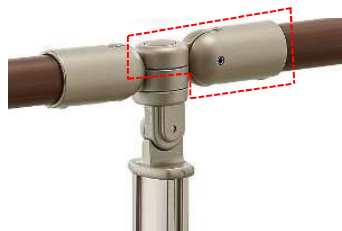

※～2019年6月ごろ

<新ブラケット>

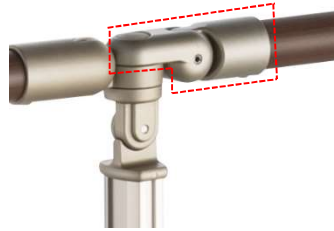


※2019年6月以降

今回の対象ではありません。
引き続きご使用ください。


点検対象となります。
次ページの手順に沿って確認してください

旧ブラケットの点検方法

1. 可変支柱ブラケット部にあるキャップを外し、回転固定ボルトを六角レンチ4mmでゆるめ、ブラケットを外してください。

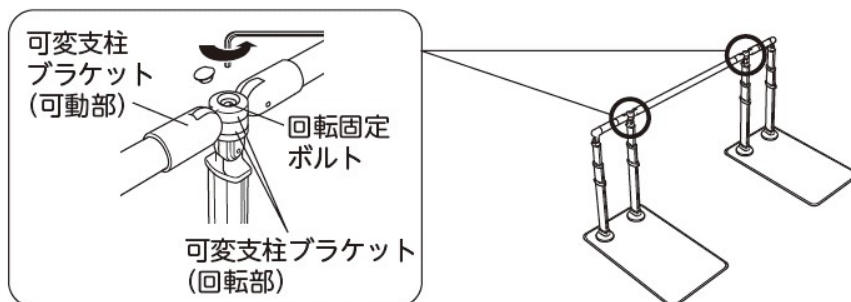

2. 可変支柱ブラケット部の赤枠部分にクラックや打痕傷など製品形状とは異なる異常が無いか確認してください。

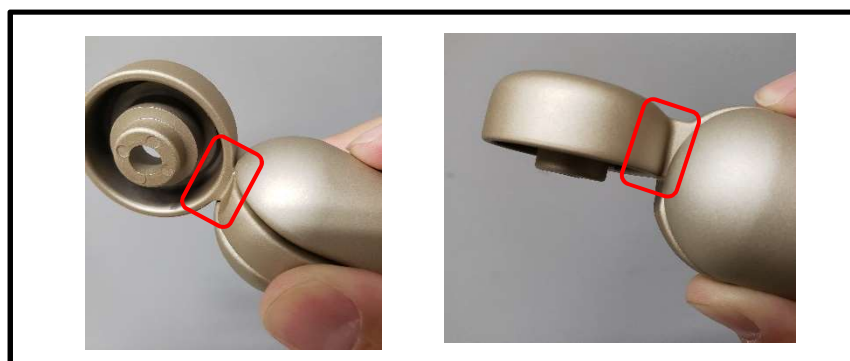

異常あり

すぐに使用を中止して、新
ブラケットに交換してくだ
さい。

異常なし

ご使用可能です。
引き続き、取扱説明書をご
確認していただき、ご使用
ください。