




確認してね

いつも安全にお使いいただくため、以下の項目を点検してください。

毎回、ご使用前に製品を前後・左右にかるくゆらして、ガタつきやずれがないか、しっかり固定されているか、確認してください。

ガタつきがない場合

そのままご使用いただけます。

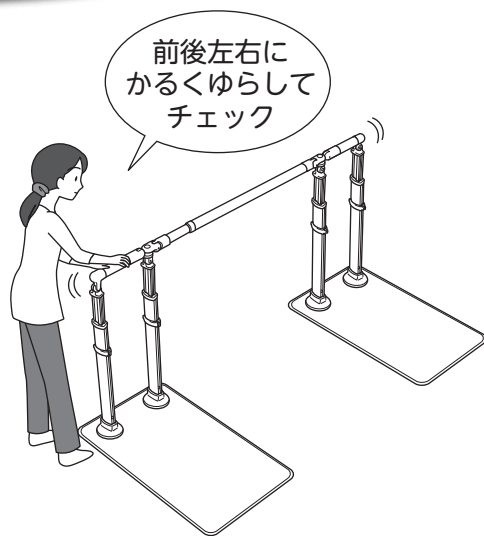


ガタつきがある場合

ガタついたまま使用されると、転倒につながるおそれがあります。ただちに使用を中止し、以下の項目を確認してください。


ベースプレートがガタついていませんか？

以下のような状態であると、ガタつきや、転倒の原因になります。

ベースプレートに乗ると、ガタガタする

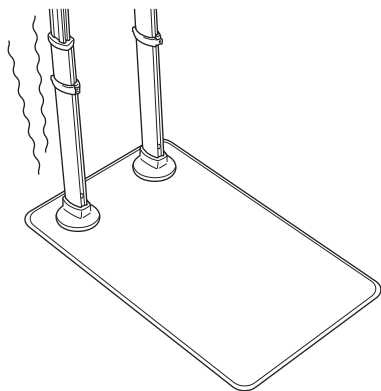





ガタつき調整用ボルトが飛び出している

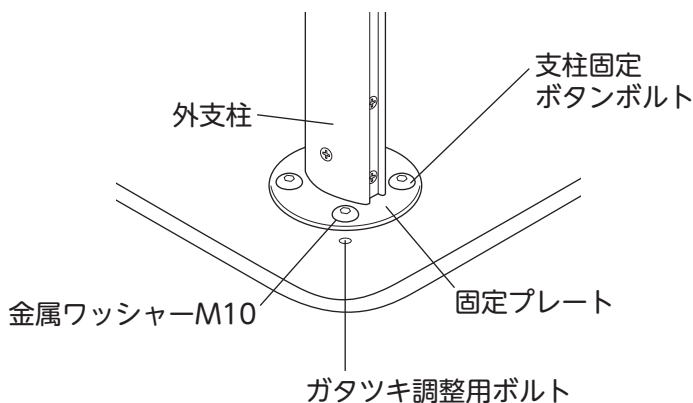

直し方 貸与事業所にご連絡ください

部品の固定がゆるんでいませんか？

以下の部分がゆるんでいると、手すりのガタつきの原因になります。

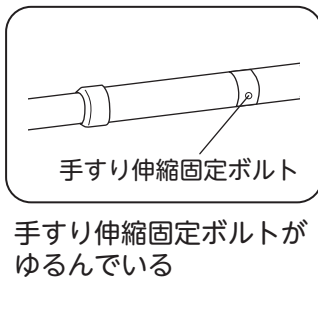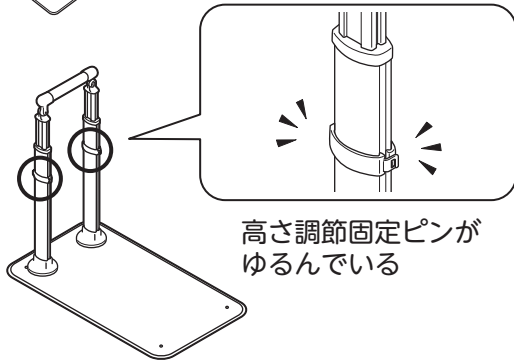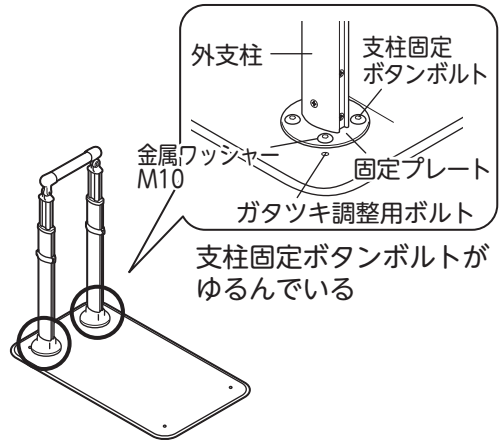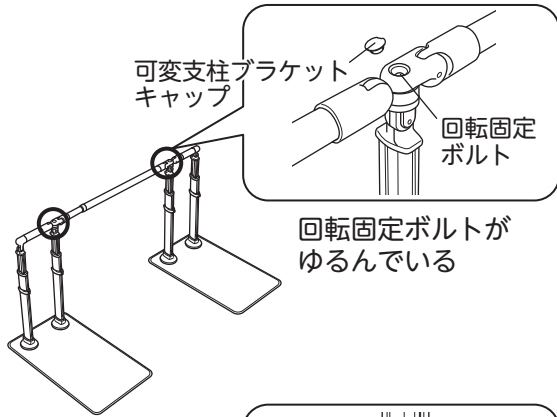

直し方 貸与事業所にご連絡ください

販売店様捺印欄

●お問い合わせは…

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

TOAGOSEI グループ

アロン化成株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

ライフサポート事業部