

安^{あんじゅ}寿

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ[°]

ノーマルタイプ／はねあげタイプ

家具調トイレ セレクトRシリーズに
自動ラップが仲間入り。

ポータブルトイレの 汚物処理とニオイの問題を **解決!**

フ ィ ル ム で
バケツの洗浄が不要



熱 圧 着 で
ニオイを密封



自動ラップ機能で
**後処理が
簡単!**



ARONKASEI CO., LTD.



ポータブルトイレ 2大問題



汚物処理


- バケツを洗う介護負担が大きい、時間がかかる…
- バケツを洗う場所がない…
- バケツを持ち運ぶときこぼしてしまいそうになる…
- 衛生面が不安…

ニオイ

- お部屋にニオイがこもってしまう…(カーテンや壁にしみこんでしまう)
- 周りに気づかれるのが恥ずかしい…
- ニオイがきつくて介助がおっくうに…


関連DATA

「ポータブルトイレ購入時に重視したこと」「購入後、不満に思ったこと」200名対象(複数回答可)
2014年アロン化成調べ

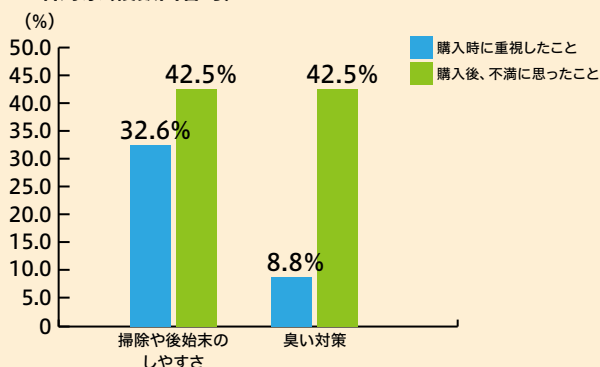

汚物処理などの後始末とニオイの問題は、購入後、不満に思われています！

排泄物の後始末の際に、困っていることは？
2014年アロン化成調べ

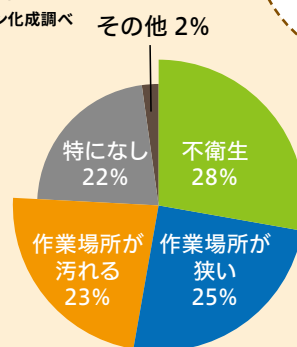

不衛生、作業場所が狭い、汚れるなどの理由で、約75%の人が排泄物の後始末に困っています！

自動ラップ機能で
後処理が簡単！



家具調トイレ セレクトRで好評な機能を搭載！

尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ！


尿こぼれを防止する長穴便座と先端R形状

標準便座、ソフト便座、暖房便座全てに長穴形状(穴長さ31cm)を採用。さらに先端R形状で深座りを誘導し、尿こぼれを防ぎます。



こぼれガード付き

「こぼれガード」部分が前方への飛び散りやこぼれを防ぐ機構になっています。また「止水カバー」によって、木部や機械部分への尿の侵入を防ぎます。

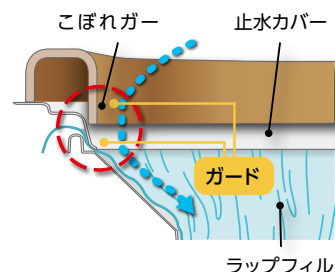

汚れた時も掃除しやすい！

汚れやすい部品はプラスチックで防御

汚れやすい部品はプラスチック製なので、尿がついても染み込まずに拭き取れます。



立ち上がりやすい足引きスペース

足を引くことができるスペースを設けたので、立ち上がりやすい構造になっています。



トレーは足引きスペースにあわせた形状で、立ち上がるときに邪魔になりません。

ラップ
ユニットが
決！

自動ラップ機能 でらくらく後処理！



バケツ洗淨
不要

ワンタッチ操作で排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありません。

ニオイを
密封

防臭効果のあるフィルムで汚物を密封し、ニオイがお部屋に広がるのを防ぎます。

自動ラップ排泄処理の仕組み

① ラップ処理開始

排泄後、リモコンのボタンを押すと自動ラップ処理が開始されます。



② フィルム送り

排泄物を包み込むため、自動でフィルムが送り出されます。



③ 密封

熱圧着して排泄物を密封します。



④ 切り離し

約90秒後、密封された袋が切り離されます。



使い方

① 専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用します。



② リモコンの作動ボタンを押す

排泄後、作動ボタンを押すと、自動的にラップ処理を開始します。また、リモコンに処理時間の目安が表示されます。(ラップ処理終了まで約90秒かかります。)



③ ラップ済み袋を取り出す

自動的にラップ処理が完了したらトレーから袋を取り出してください。



選べるひじ掛けタイプ

● ノーマル

前方に支柱のないひじ掛けで、ゆったり足を広げられます。



● はねあげ

はねあげ式ひじ掛けで移乗に便利です。



POINT

ワンタッチでロック解除。スムーズに操作が行えます。



移乗スペーサーでベッドとのすき間を埋め、より安全な移乗動作が行えます。



高さ調整機能

ひじ掛けの高さ
4段階調整



便座の高さ
5段階調整



コンパクト設計

スペースに余裕がないお部屋でも動線が確保しやすいコンパクトサイズです。

幅48cm～



キャスター標準装備

移動時に負担がかからず、楽に移動ができます。



分かりやすく、使いやすい。 自動ラップ排泄処理ユニット。

処理が完了するまでの
時間が分かる


作動ボタンを押すと、処理が完了するまでの時間の目安がリモコンに表示されます。(約90秒)




製品寸法図

単位:cm


ノーマルタイプ

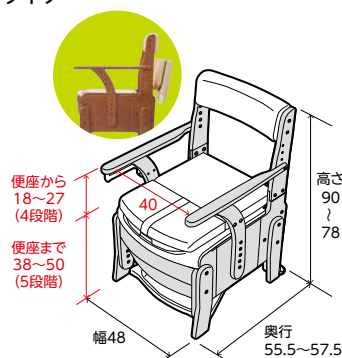

便座寸法(共通)

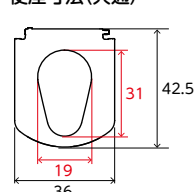

はねあげタイプ

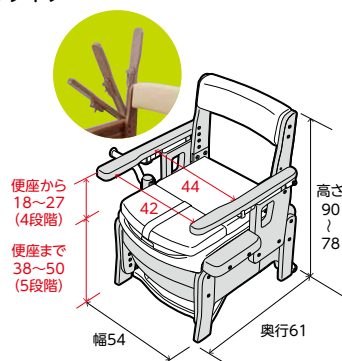

仕様

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

	ノーマルタイプ			はねあげタイプ		
	標準便座	ソフト便座	暖房便座	標準便座	ソフト便座	暖房便座
商品コード	533-940	533-941	533-942	533-943	533-944	533-945
商品サイズ	幅48×奥行55.5~57.5×高さ78~90cm (便座までの高さ:38・41・44・47・50cm)			幅54×奥行61×高さ78~90cm (便座までの高さ:38・41・44・47・50cm)		
商品重量	約19.5kg	約19.6kg	約20.2kg	約22.6kg	約22.7kg	約23.4kg
材質	(構造部材)天然木[ラバーウッド]※表面加工:ウレタン樹脂塗装 (張り材・クッション材)合成皮革[PVC]・ウレタンフォーム (受け板・パケツ・止水カバー・パケツ受け)PP (ラップユニット)PBT・ABS樹脂 標準便座・暖房便座…(便座)PP ※便座は抗菌加工 ソフト便座…(便座)EVA樹脂 ※便座は抗菌加工 (便座ベース板)…PP					
パケツ容量	約9ℓ					
梱包入数	1					
JANコード	862452	862469	862476	862483	862490	862506
価格(税抜)	139,000円	145,000円	155,000円	160,000円	166,000円	176,000円
定格	75W以下 電源電圧入力: AC100V±10V(ACアダプター使用)、 またはDC13.5V±1V(電圧ドロップ含む)					

※自動ラップトイレの使用には、別途消耗品のご購入が必要です。
(消耗品は本体に添付されておりません)



自動ラップポータブルトイレ 専用凝固剤

商品コード	533-946
JANコード	862513
価格(税抜)	1,200円
約60回分	梱包入数 6



自動ラップポータブルトイレ 専用フィルムカセット

商品コード	533-947
JANコード	862520
価格(税抜)	2,400円
約60回分	梱包入数 8

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す「49-70210」は共通です。

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具

組立完成品

最大使用者体重 100kg



※標準便座
タイプ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube

Twitter

Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…