



サニタリースの取り付けについて

1 装着許容寸法図

ご家庭の和式トイレにサニタリースを取り付ける場合、下記の寸法でなければなりません。

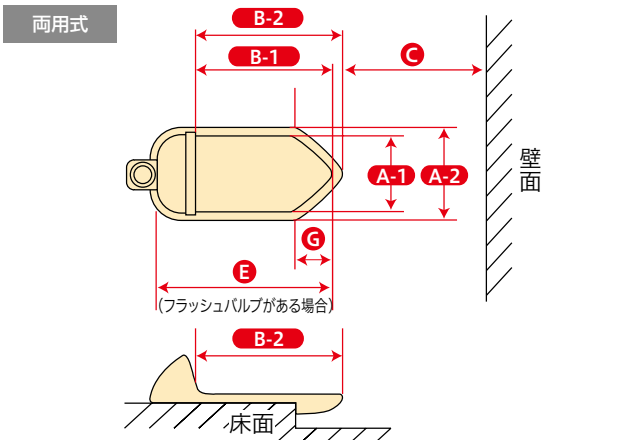

対応商品	A-1	A-2	B-1	B-2	C	E	G
HG両用式	17cm以上	33cm以下	42cm以上	50cm以下	30cm以上	53cm以上	—
OD両用式	17cm以上	31cm以下	41cm以上	50cm以下	30cm以上	51cm以上	2.5cm以上


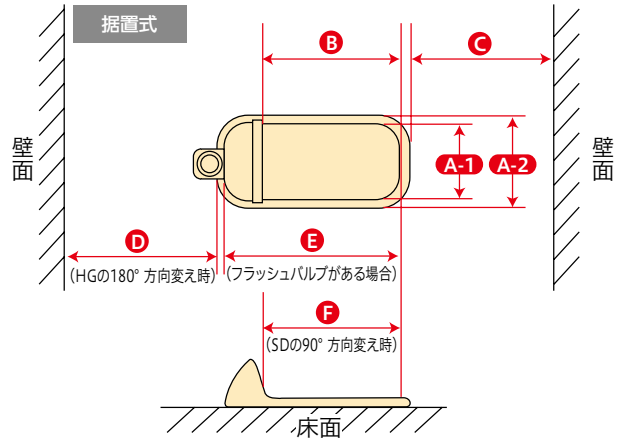


対応商品	A-1	A-2	B	C	D	E	F
HG据置式	18.5cm以上	33cm以下	25cm以上	30cm以上	30cm以上	42cm以上	—
OD据置式	18.5cm以上	30cm以下	21.5cm以上	30cm以上	—	40cm以上	—
SD据置式	18.5cm以上	28.5cm以下	19cm以上	30cm以上	—	40cm以上	31cm以上

※SD据置式で90°方向変えしない場合のA-2寸法は30cm以下。

2 取り付け可能な便器の形状

●SD据置式で90°方向変えする場合

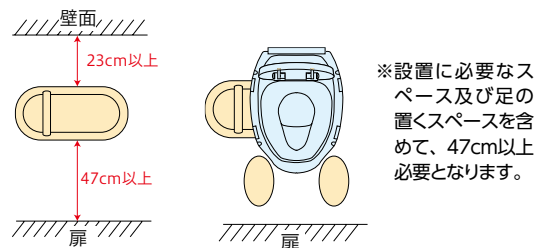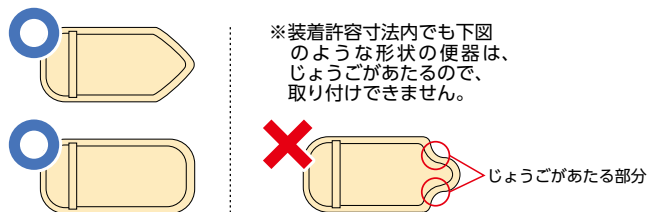

3 固定方法について

- ①HG両用式は便器に仮固定できます。
- ②OD両用式は固定できません。
- ③据置式は床面にネジで固定できます。

〈③の取り付けについて〉




※工事部材は別途必要です。

	ネジの種類	HG	OD/SD
床が木の場合	木ネジ	M6 (首下長さ45mmまで)	M6 (首下長さ50mmまで)
床がコンクリート あるいは タイル貼りの場合	コンクリート用ネジ (アンカーボルトや プラグなど)	M6 (首下長さ45mmまで)	M6 (首下長さ50mmまで)

4 両用式の高さの目安

両用式設置イメージ
(高さの目安)

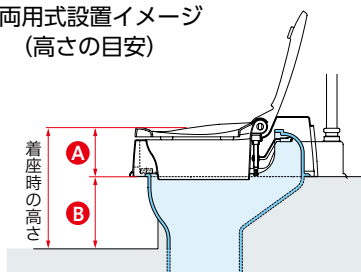

製品の便座までの高さ：(A寸法) + 床の段差 (B寸法) が実際の着座時の高さになります。