

木製玄関台との組み合わせ

- 木製玄関台と上がりかまち用手すりを組み合わせて使用すると、段差の昇降動作を安定した姿勢で安心して行うことができます。



上がりかまち用手すり1100と木製玄関台2段の組み合わせ



上がりかまち用手すり950と木製玄関台1段奥行40cmの組み合わせ




上がりかまち用手すり650と木製玄関台無し組み合わせ

■木製玄関台・上がりかまち用手すり推奨組み合わせ

段差高さ	木製玄関台	上がりかまち用手すり
15cm以下	—	140、300、650シリーズ
25cm	木製玄関台1段 奥行30cm	650シリーズ
25cm	木製玄関台1段 奥行40cm	950シリーズ
30cm	木製玄関台2段	1100シリーズ
40cm	木製玄関台3段	(住宅用連続手すり設置)

取り付け可能なかまちサイズ

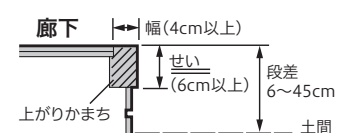


- 上がりかまちの形状が四角形状であること
- 段差が6～45cmであること
- 上がりかまちの幅が4cm以上で、且つせいが6cm以上であること

●式台がある玄関に設置する場合

設置例①(土間にスライド脚を設置)




土間にスライド脚を設置

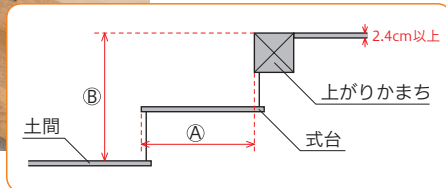

設置例②(式台にスライド脚を設置)



式台にスライド脚を設置

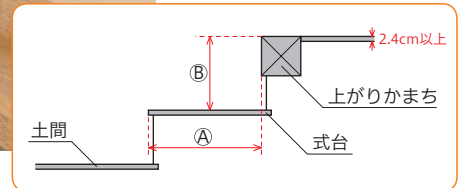

■土間にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	L型の場合	F型の場合	寸法B	
	寸法A	寸法A		
K-140	—	—	L型6～45cm F型0～45cm	
KM-300	21cm未満	21cm未満		
K-650	32cm未満	32cm未満		
KM-650				
S-650				
SM-650				
S-950	59cm未満	15cm以上		
SM-950		59cm未満		
SM-1100	29cm未満	15cm以上 29cm未満		L型16～45cm F型10～45cm

※式台の幅が設置可能寸法から外れている場合は取り付けできません。

■式台にスライド脚を設置する場合の設置可能寸法

品名	L型の場合	F型の場合	寸法B
	寸法A	寸法A	
K-140	12cm以上	12cm以上	L型6～45cm F型0～45cm
KM-300	27cm以上	21cm以上	
K-650	38cm以上	21cm以上	
KM-650			
S-650			
SM-650			

※S-950・SM-950・SM-1100は、式台には設置できません。

※取り付け位置をずらして設置する場合は、式台の端から2cm奥にスライド脚を設置してください。