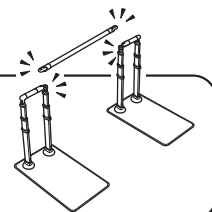


このたびはAT-Cシリーズをご利用いただき、まことにありがとうございます。  
設置時、特に気を付けなければいけない点を下記リストで確認してください。



**製品を移動させるときは、可変支柱ブラケットの回転固定ボルトをゆるめて、別々に移動すること**

そのまま移動させようとする、床面に傷がついたり、製品が破損する原因になります。

チェック項目	チェック
2枚のベースプレートがしっかりと地面に接地し、支柱が垂直になるように設置しましたか？	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・手すりの角度は45°以内に納まるように設置しましたか？</li> <li>・2枚のベースプレートは平行になるように設置しましたか？</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・手すりはベースプレートのある側から使用するよう設置しましたか？</li> </ul>	
ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面、車いすが通行するスロープの上に設置していませんか？	
開き戸付近に設置するときは、扉と手すりとの干渉や扉下とベースプレートとの干渉を確認して設置できていますか？	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガタツキ調整用ボルトを使用するときは、地面に傷がつかないか確認しましたか？</li> <li>・靴をぬいで歩く場所ではガタツキ調整用ボルトを外していますか？</li> </ul>	

製品に関するご意見・お問い合わせは

**お客様相談室**

フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

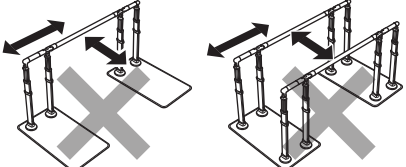
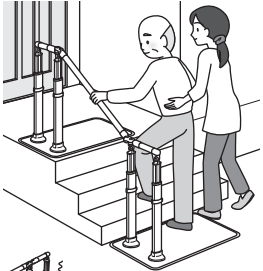
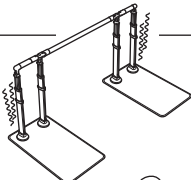
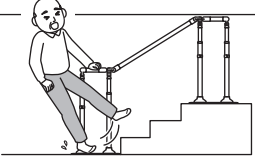
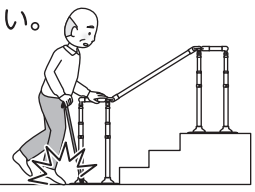
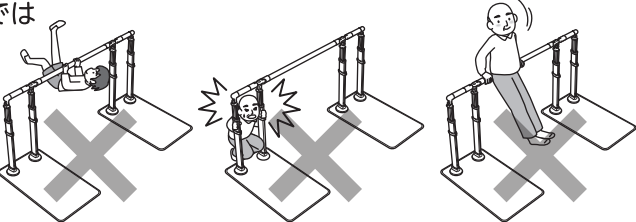
URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。  
・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

ご利用者様や介護従事者様に向けて、特に気を付けなければいけない点をまとめております。より安全に製品をご利用していただくためにも、下記リストについて十分にご説明ください。

チェック項目	チェック
<p>手すりに対して水平に力を加えたり、勢いよく力を加えるなどベースプレートが浮き上がるような使用をしないでください。</p>	
<p>使用するときは、製品の安定性や利用者の身体状況を確認してから使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手すりの高さや、設置する位置は合っていますか？</li> <li>・利用者が自分の身体で十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うようにご指示ください。</li> <li>・予測できない行動をとる利用者や、自力で危険な状態から回避することが難しい利用者には使用しないでください。</li> </ul>	
<p>・ご使用中にゆるみやガタつきが発生した場合、ただちに使用を中止し、貸与事業所に相談してください。</p>	
<p>・ベースプレートに砂利や土、雪などが乗ったまま使用しないでください。 ・ぬれた状態の手すりやベースプレートは滑りやすくなるので注意してください。</p>	
<p>・ベースプレートに段差がありますので、つまづかないように注意してください。 ・ベースプレートに足を乗せるときは、すべり止めシートにつまづかないように注意してください。</p>	
<p>・子ども、幼児を遊ばせるなど、ほかの用途では使用しないでください。 ・手すり支柱の間に頭、体、手や足などを入れないでください。 ・手すりに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。</p>	

その他の注意点は、取扱説明書「安全上のご注意」の警告と注意をしっかりとご説明のご利用ください。

製品に関するご意見・お問い合わせは

### お客様相談室

フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



## アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。  
・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。