



確認してね

いつも安全にお使いいただくため、以下の項目を点検してください。

毎回、ご使用前に製品を前後・左右にかるくゆらして、ガタつきやずれがないか、しっかり固定されているか、確認してください。

ガタつきがない場合

そのままご使用いただけます。

前後左右にかるくゆらしてチェック



ガタつきがある場合


ガタついたまま使用されると、転倒につながるおそれがあります。ただちに使用を中止し、以下の項目を点検して対処してください。

点検をしてもガタつきやずれが解消しない場合は、販売店にご相談ください。



製品が便器にしっかり固定されていますか？

便器固定ノブボルトがゆるんでいると、ガタつきや、製品が便器から外れる原因になります。

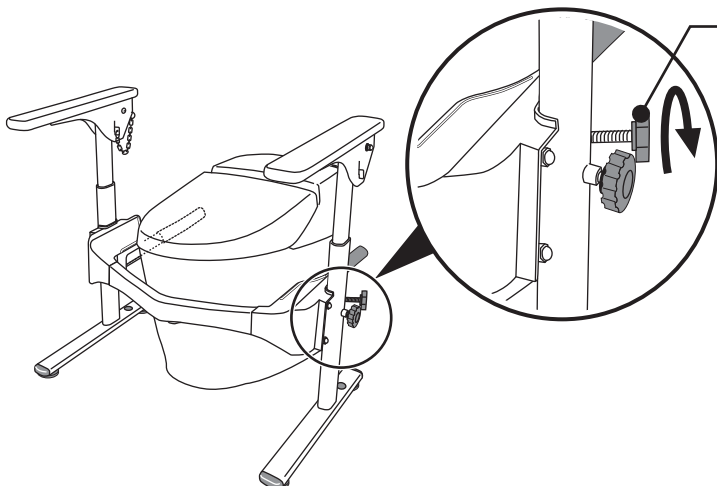

便器固定ノブボルト

直し方

便器固定ノブボルトをしめ直してください。


製品が便器からずれている場合は、取扱説明書P.11を参照して、再度取り付け直してください。

しめ直しできない、しめ直しで改善されない場合は、お求めの販売店へご相談ください。

上記の対応でガタつきが直らない場合は、裏面をご確認ください。

製品全体がガタついていませんか

以下の部分がゆるんでいたり、外れていると、製品全体のガタつきの原因になります。

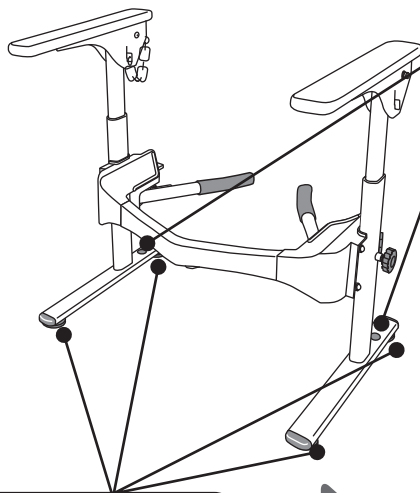


アンカーボルトや木ネジ(床に固定している場合)

お客様は修理を行わず、
必ずお求めの販売店へご相談ください。


※修理の際は固定状況を確認し、取扱説明書P.12を参照して、専用の工具で確実に固定してください。

(アンカーボルトの場合)

ソケットレンチ
(10 mm)

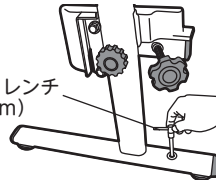

(木ネジの場合)

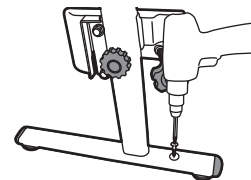

アジャスター

直し方

アジャスターを調節してください。また外れていた場合は取り付けてください。

※調節できない場合や、調節をしても改善されない場合は、お求めの販売店へご相談ください。


ひじ掛けがガタついていませんか

以下の部分がゆるんでいるとひじ掛けのガタつきの原因になります。

ひじ掛けを支柱に固定しているネジ

お客様は修理を行わず、
必ずお求めの販売店へ
ご相談ください。


※修理の際は取扱説明書
P.17～18を参照し、
ネジをしめ付けてください。

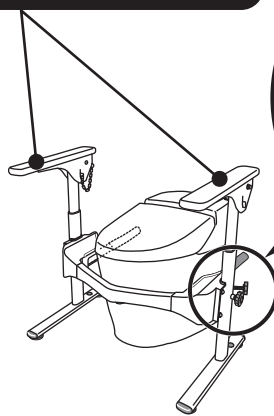

高さ調節ボルト

直し方

高さ調節ボルトをしっかり
しめ直してください。

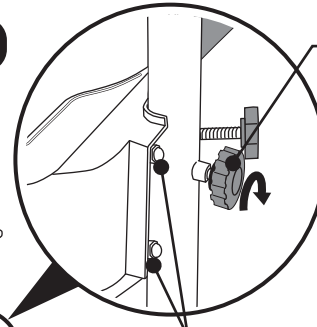

接続ナット

お客様は修理を行わず、
必ずお求めの販売店へご相談ください。

※修理の際は取扱説明書P.9～10を参照し、
専用の工具で確実にしめ付けてください。

販売店様捺印欄

●お問い合わせは…

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索