

歩行車リトルターン（電動アシスト付） メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書の点検	取扱説明書の有無を確認してください	取扱説明書
②バッグの点検	1)ファスナーがスムーズに動く 2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない 3)取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されている	バッグ
③各種シールの点検	1)保護シールが前後左右脚部に4カ所ある 2)ブレーキ・駐車ロックシールが左右のブレーキ基部内側に2カ所ある 3)高さ調節ロック解除シールが左右の高さ調節ボタンに2カ所ある 4)指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある 5)ブレーキ調節表示シールが左右のブレーキ調節ネジに2カ所ある 6)ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部外側に左右2カ所ある 7)操作パネルシールが制御ボックス上側に1カ所ある	※ご購入先にお問い合わせください
④杖ホルダーの点検	杖ホルダーに割れや、劣化がない。	杖ホルダー
⑤杖固定ベルトの点検	杖固定ベルトに破れや、ほつれがない。	杖固定ベルト

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない 2)フレームに異常（ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき）がない	補修ペイント ×（廃棄）
②溶接部の点検	1)フレーム溶接部にガタつきやはずれがない 2)クロスバー溶接部にガタつきやはずれがない 3)ハンドルポスト溶接部にガタつきやはずれがない	×（廃棄） ×（廃棄） ×（廃棄）
③バネ部の点検	1)折りたたみ防止フック部のバネに錆、外れがない 2)折りたたみ防止フック部のバネが伸びて引きが悪くなっていない 3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が外を向いて指に触れない 4)左右2カ所のブレーキバネに錆、外れがない 5)左右2カ所のブレーキバネが伸びて引きが悪くなっていない 6)左右2カ所のブレーキバネの先端が外を向いて指に触れない	×（廃棄） ×（廃棄） ×（廃棄） ブレーキバネ ブレーキバネ ブレーキバネ
④ネジ部の点検	1)座面固定ボルトが6カ所とも緩みなく締まっている 2)ブレーキ板固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている 3)クロスバーのネジ部11カ所が緩みなく締まっている 4)ハンドル基部のネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている 5)姿勢保持ベルト基部のネジが左右計6カ所とも緩みなく締まっている 6)姿勢保持ベルト固定ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている 7)制御ボックスとステーのネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている	座面固定ボルト ブレーキ板固定ボルトセット ×（廃棄） ※対処方法については製造元にご確認ください。 姿勢保持ベルトセット 姿勢保持ベルト固定ノブボルト ※対処方法については製造元にご確認ください。
⑤樹脂部の点検	1)ハンドルグリップ（左右計2カ所）に傷、汚れ、割れがない 2)シートパイプエンドキャップ（左右計4カ所）に傷、汚れ、割れがない 3)折りたたみ保持フックに傷、汚れ、割れがない 4)ハンドルポスト受け（左右計2カ所）、高さ調節スイッチ（左右計2カ所）に傷、汚れ、割れがない 5)姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがない	ハンドルグリップ シートパイプエンドキャップ 折りたたみ保持フック ハンドルポスト受けセット 姿勢保持ベルトセット

※裏面へ続きます

歩行車リトルターン（電動アシスト付） メンテナンスチェックリスト

チェック欄

交換部品

⑥電池の点検	1) 電池のツメ(2カ所)に割れ、破損がない	電池
	2) 電池の端子に汚れ、変形、破損がない	電池
	3) 電池ケースに割れ、破損がない	電池
⑦配線の点検	1) 配線に切れ、折れ、被覆の破れがない	※対処方法については製造元にご確認ください。
⑧制御ボックスの点検	1) 制御ボックスに割れ、破損がない	※対処方法については製造元にご確認ください。

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

①車輪の点検	1) 前輪(左右計2カ所)に摩耗や割れがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	2) 前輪フォークキャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない	前輪フォークキャップ
	3) 前輪キャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	4) 前輪カシメワッシャー(左右計2カ所)に割れ、緩みがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	5) 前輪フォーク(左右計2カ所)に割れやゆがみがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	6) 前輪フォーク固定ナット(左右計2カ所)に緩みがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	7) 前輪ベアリング(左右計4カ所) 前輪フォークベアリング(左右計4カ所)に割れなどがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)、 フォークベアリングセット
	8) 後輪(左右計2カ所)に摩耗や割れがない	後輪セット
	9) 後輪のボルトに緩みがない(左右計8カ所)	後輪セット
	10) 前後4輪が同時に接地する	※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	11) 前輪(左右計2カ所)が360° スムーズに回転する	
	12) 車体を押したときに、違和感なく直進する	
②ブレーキ・ 駐車ロックの 点検	1) ブレーキレバー(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキレバーセット
	2) ブレーキ基部(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキ基部
	3) ブレーキ基部キャップ(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキ基部キャップ
	4) ブレーキバネカバー(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキバネカバー
	5) ブレーキ板に取り付けられているゴム部に摩耗、亀裂、剥がれがない	ブレーキ板
	6) ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない	※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	7) ブレーキレバーを十分握ることができる	
	8) ブレーキの利き具合が正常である	
	9) ブレーキ板に大きなガタツキがない	
	10) 駐車ロックが正常に作動する	
③高さ調節の 点検	1) 高さ調節が正常に行える	※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください
④折りたたみ 動作の点検	1) 折りたたみがスムーズに行える	×(廃棄)

4. アシスト機能の点検

チェック欄

交換部品

①アシスト 機能の点検	1) 登坂路、降坂路でアシスト機能が作動する(縦断勾配 12% (7度) 以下)	※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	2) 片傾斜勾配路でアシスト機能が作動する(横断勾配 5% (3度) 以下)	
	3) 登坂路、降坂路でグリップから両手を放すと停車(微動)する	
②操作パネルの 点検	1) 電源を入れた時に操作パネルの「注意」LEDが消灯する	※対処方法については 製造元にご確認ください。
③音声案内の 点検	1) 操作パネルの「電源」が入った状態で、「切替」を 2秒以上押し続けて音量が切り替わる	※対処方法については 製造元にご確認ください。
④電池の点検	1) 電池を専用充電器で約3時間充電し、操作パネルの電池残量 LEDが3つ点灯(80%以上)する	電池

おつかれさまでした

