

歩行車トライリンク メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

① 付属品の点検

チェック欄

交換部品

項目	チェック欄	交換部品
1. 取扱説明書		取扱説明書
2. バッグ	1 バッグ部にほつれ、破れ、汚れがない	バッグ
3. 各種シール	1 ブレーキ操作シールが左右のブレーキ基部に2カ所ある	ブレーキ操作シール
	2 指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある	指はさみ注意シール
4. 杖ホルダー 杖固定具	1 割れ、劣化がない	杖ホルダーセット 杖固定具

② 外観の点検

チェック欄

交換部品

項目	チェック欄	交換部品
1. フレームの点検	1 フレームに異常（ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき）がない	×（廃棄）
2. 溶接部の点検	1 クロスバー溶接部、フレーム溶接部にガタつきや外れがない	×（廃棄）
3. バネ部の点検	1 左右2カ所のブレーキバネに錆、外れ、折れがない	×（廃棄）
	2 左右2カ所のブレーキバネが伸びて、ブレーキをかけたときにブレーキレバーの戻りが悪くなっていない	×（廃棄）
4. ネジ部の点検	1 クロスバー固定ボルトが5カ所とも緩みなく締まっている	×（廃棄）
	2 ブレーキ基部固定ボルトが左右計4カ所とも緩みなく締まっている	ブレーキ基部セット
	3 姿勢保持ベルト固定ボルトが左右計4カ所とも緩みなく締まっている	姿勢保持ベルトセット
	4 ブレーキ板回転防止ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている	×（廃棄）
	5 ハンドルポスト受け固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている	×（廃棄）
5. 樹脂部の点検	1 ハンドルグリップ（左右計2カ所）に傷、汚れ、割れがない	ハンドルグリップ
	2 シートパイプ端部キャップ（左右計4カ所）に傷、汚れ、割れがない	シートパイプ端部キャップ（前） シートパイプ端部キャップ（後）
	3 折りたたみ防止ロックに傷、汚れ、割れがない	×（廃棄）
	4 ハンドルポスト受け（左右計2カ所）に傷、汚れ、割れがない	×（廃棄）
	5 姿勢保持ベルトに傷、汚れ、割れがない	姿勢保持ベルトセット
	6 反射板（前後左右計4カ所）に傷、汚れ、割れがない	反射板（前） 反射板（右） 反射板（左）
	7 クロスバー基部（左右計2カ所）に傷、汚れ、割れがない	×（廃棄）

※裏面へ続きます

歩行車リトルターン メンテナンスチェックリスト

③ 性能の点検

チェック欄

交換部品

1. 車輪の点検	A	1	前輪（左右計2カ所）に摩耗や割れがない		前輪セット
		2	前輪フォーク、前輪フォーク基部（各々左右計2カ所）に傷、割れ、ゆがみがない		前輪フォークセット
		3	前輪固定ボルト（左右計2カ所）に緩みがない		前輪セット
	B	1	後輪（左右計2カ所）に摩耗や割れがない		後輪セット
		2	後輪ベアリング（左右計2カ所）に割れなどが無い		後輪セット
		3	後輪固定ボルト（左右計2カ所）に緩みがない		後輪セット
	C	1	前後4輪が同時に接地する		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
		2	前輪（左右計2カ所）が360°スムーズに回転する		
		3	車体を押したときに、違和感なく直進する		
2. ブレーキ・ 駐車ロックの 点検	1	ブレーキレバー（左右計2カ所）に傷や割れがない		ブレーキレバーセット	
	2	ブレーキ基部（左右計2カ所）に傷や割れがない		ブレーキ基部セット	
	3	ブレーキ基部キャップ（左右計2カ所）に傷や割れがない		ブレーキ基部キャップ	
	4	ブレーキ板と車輪の間隔が左右とも3mm程度である		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください	
	5	ブレーキレバーを十分握ることができる			
	6	ブレーキの利き具合が正常である			
	7	駐車ロックが正常に作動する			
3. 高さ調節の点検	1	高さ調節が正常に行える			
4. 折りたたみ動作の点検	1	折りたたみがスムーズに行える			

おつかれさまでした。

