

安 あんじゅ 寿

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

アットグリップ トイレサポート
H-S / H-T / HN-T / N-S / N-T

ATTOGRIP
アットグリップ

どんな便器にも
トイレ環境にも置ける
「置くだけ」タイプ



ATTOGRIP
アットグリップ

トイレサポートシリーズ ラインナップ



H-S 片側はねあげ



H-T 両側はねあげ



HN-T 片側はねあげ／
片側ノーマル



N-S 片側ノーマル



N-T 両側ノーマル


ARONKASEI CO., LTD.

高い安定性を保ちつつ、
置くだけ簡単な
シンプル構造




1 置くだけ設置！

便器の前に据え置く構造なので、
便器の形状や材質の影響を受けず
どんなトイレ環境にも設置できます。

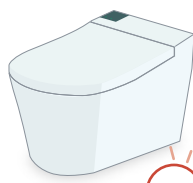

樹脂製便器

OK

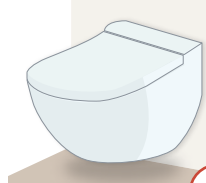

壁付/タンクレス便器

OK



特殊形状便器

OK

2 多彩なひじ掛け設定で 様々なトイレ環境 身体状況 にフィット

① ひじ掛けを選べます



はねあげ
タイプ

- 横からのアプローチに。
- 介助の動線確保に。



ノーマル
タイプ

- 正面からのアプローチに。

② 手すりの位置を前後左右に調節できます

左右調節（ひじ掛け内寸）

支柱を180度回転させることで
ひじ掛け内寸を調節できます。



狭
座位保持に
43cm



広
ゆったり
48cm

ペーパーホルダー
や温水洗浄便座の
リモコンも回避で
きます。

※片側の支柱だけを外側に取り付けることもできます

前後調節

支柱の固定位置を変えることで
前後に調節できます。



ベーシック




ベーシック
よりも+8cm

前方に手を置ける
ので、立ち上がり
姿勢（前傾）が
より安定します。


※便器先端からひじ掛け先端までの距離

③ 高さ調節ができます

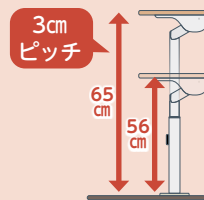

体格に合わせて調節できます。

④ 片ひじ掛けも選べます

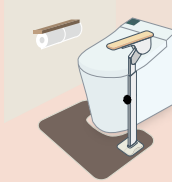

障害物がある場合や、身体状況
に応じて片ひじ掛けも選べます。



3 尿臭染み付きを防止！

耐蝕コーティングされた「ベースプレート」とベースプレート全面を覆う「洗えるマット」で尿臭染み付きを防止します。




4 設置は簡単！あっという間に完了

支柱の取り付け



支柱は上から簡単に固定でき、ベースプレートを裏返す必要がありません。

ひじ掛け高さ調節

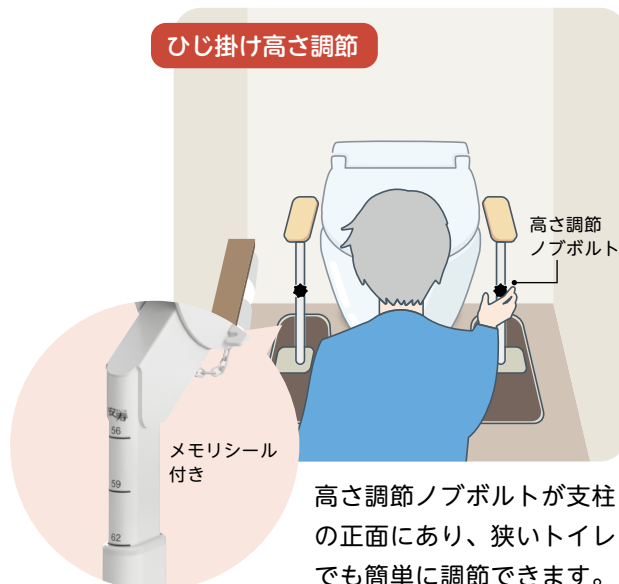

高さ調節ノブボルトが支柱の正面にあり、狭いトイレでも簡単に調節できます。

仕 様

H…はねあげ N…ノーマル（固定） S…シングル（片ひじ） T…ツイン（両ひじ）

商品名	トイレサポート H-S	トイレサポート H-T	トイレサポート HN-T	トイレサポート N-S	トイレサポート N-T
ひじ掛けタイプ	片側はねあげ	両側はねあげ	片側はねあげ／片側ノーマル	片側ノーマル	両側ノーマル
					
	ひじ掛けは左右付け替え可能		ひじ掛けは左右付け替え可能	ひじ掛けは左右付け替え可能	
価格（税抜）	55,000円	69,000円	64,000円	50,000円	59,000円
商品コード	870-087	870-088	870-089	870-090	870-091
TAIS	000577	000578	000579	000580	000581
JAN	03200-8	03209-1	03210-7	03211-4	03212-1
重量	約11.8kg	約14.6kg	約13.9kg	約11.0kg	約13.1kg
ひじ掛け内寸	—	48cm/43cm	48cm/43cm	—	48cm/43cm
材質	（木製ひじ掛け）ラバーウッド無垢材／（支柱・ベースプレート）スチール／（支柱カバー）ポリエチレン／（専用マット）ポリエステル、ポリウレタン				
選定の目安					
	はねあげタイプ 横アプローチや、 介助スペースの 動線確保に。	はねあげタイプ 横アプローチや、 介助スペースの 動線確保に。	はねあげタイプ 横アプローチや、 介助スペースの 動線確保に。	ノーマルタイプ 正面からの アプローチに。	ノーマルタイプ 正面からの アプローチに。
					
	片ひじタイプ 片ひじでスッキリ	両ひじタイプ 両ひじで しっかり姿勢保持	両ひじタイプ 両ひじで しっかり姿勢保持	片ひじタイプ 片ひじでスッキリ	両ひじタイプ 両ひじで しっかり姿勢保持


※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与対象品

商品寸法図

単位：cm

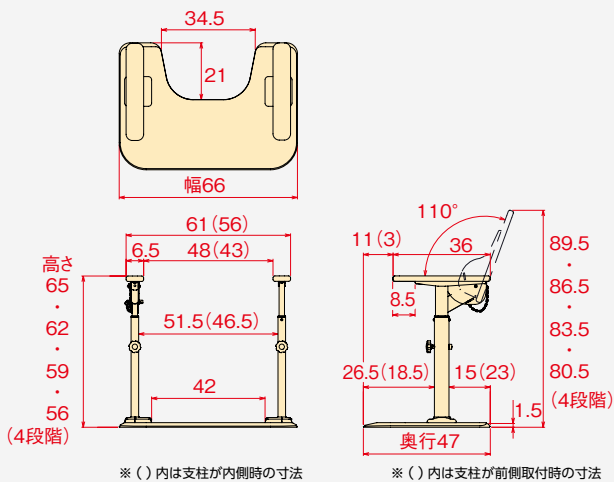

ひじ掛けノーマルタイプの寸法は、はねあげタイプと同じです（はねあげ時の高さを除く）。

従来品との使い分け

トイレ環境や身体状況から選択してください。


アットグリップ トイレサポートシリーズ

便器を選ばない
据え置きタイプ



洋式トイレ用フレーム はねあげR-2シリーズ

横荷重に強い
便器固定タイプ

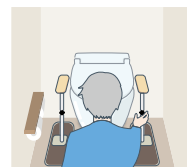


高さ調節ノブボルトが支柱の正面にあり、狭いトイレでも簡単に調節できます



メモリシール付きです。



高さ調節ノブボルトは側面にあります。

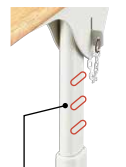

目印線が入っています。



ひじ掛けストッパーを収納できるようになりました。



ひじ掛けストッパーを使わないときは右図のように見えています。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 10:00～16:00（12:00～13:00はのぞく）

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
●個人情報とは適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは …