

安 あんじゅ 寿

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

楽 つけ
シリーズ

ユニットバス対応浴槽手すりに
“ショート”タイプを追加!!

低い浴槽壁に 取り付けできる


エプロン式浴槽に
取り付けできる

洗い場を
ひろびろ使える

30.5cm
~
44.5cm
に対応


防カビ ダブル

こんな浴槽に取り付けできる
ようになりました!

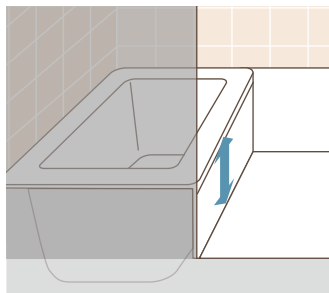

ハーフユニットバス*で
洗い場側の浴槽壁が低い浴槽

*浴槽、洗い場と壁の下半部分がユニットバスで、
天井と壁の上半部分が在来工法の浴槽。

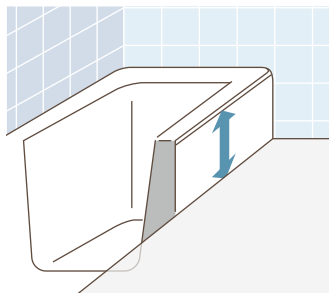

埋め込み式浴槽で
洗い場側の浴槽壁が低い



レッド

ブルー

グリーン

ARONKASEI CO., LTD.

省スペース設計

洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。

13.5cm

グリップの出っ張りが小さく
介助動作の邪魔になりません。



8cm

脚の出っ張りが小さく
利用者の脚をひっかけにくく安心です。



洗い場側

浴槽内

取り付けできる浴槽

浴槽の素材…FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽

浴槽の
サイズ

4.5cm~13cm

リムの段差 1.5cm以下
リムの高さ 2.7cm以上

30.5cm~44.5cm


10°以下

浴槽内

洗い場側

(商品寸法図)

(単位:cm)

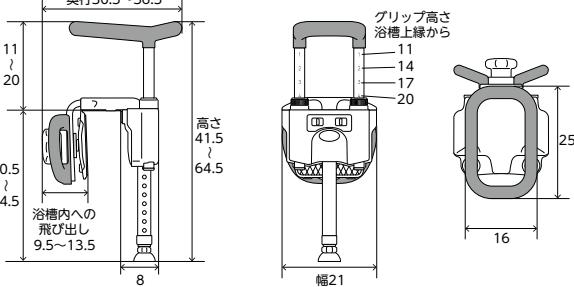

調節もカンタン

グリップの高さを、
カンタンに調節可能。

つまみをつまんで、グリップを上下にス
ライドさせるだけ。工具も不要で、カン
タンに高さを調節できます。

工具
不要



浴槽の高さに応じて
脚の長さの調節もカンタン。

脚パイプはプッシュボタンで簡単調節。脚ゴムはア
ジャスター付で床にしっかり突っ張り、安定性を向上
させます。


工具
不要

アジャスター付の脚ゴムは
手でカンタンに調節できます。



浴槽の幅に応じた
幅調節もカンタン。

フレーム抜け止めネジで、本体を分離せず
に幅調節できます。

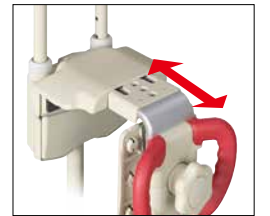

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB ショート

価 格	38,000円(税抜)
商品コード	[レッド] 536-640 [ブルー] 536-641 [グリーン] 536-642
商品サイズ	幅21×奥行30.5~36.5×高さ41.5~64.5cm グリップ高さ(浴槽上縁から)11・14・17・20cm
商品重量	約4.4kg
材 質	[カバー]ポリプロピレン [グリップ支柱]ステンレス ※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工) [フレーム]アルミニウム
梱包入数	2
J A N	[レッド] 49-70210-01378-6 [ブルー] 49-70210-01379-3 [グリーン] 49-70210-01380-9

※付属品：六角レンチ

最大使用者体重 80kg

特定福祉用具/特定介護予防福祉用具



TOAGOSEI グループ

アロン化成株式会社
アロン化成

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube X(旧ツイッター) Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
●個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…