

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

グリップ力の秘密は


“こんぺいとう”!

安心入浴を叶える
マットがリニューアル!




こんぺいとう模様でグリップ力UP

裏面
従来品

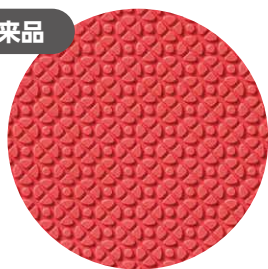


裏面
NEW

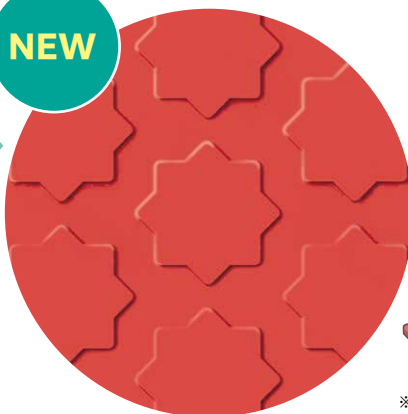

辺の多いこんぺいとう模様にすることで
多方面へのグリップ力が向上しました。

グリップ力
向上!

キュツ!

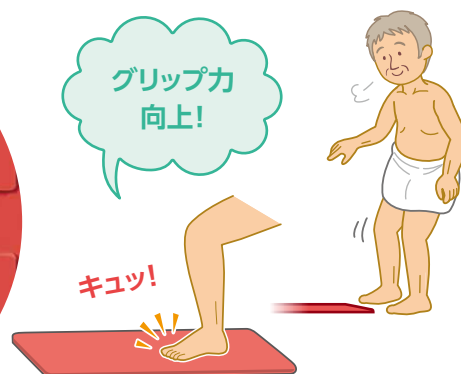

※使用前にマットがずれ動かないか十分に確認してください。

浴槽でも洗い場でもすべらず安心して入浴できる



浴槽底に設置して、
身体を安定させる
ことができます。

浴槽への出入りで
足をつく場所等、
すべりの気になる
場所に設置できます。



敷く向きを変えて隅までぴったり

カーブの大きさを使い分けられるので、
多くの浴槽にぴったりフィット。


カーブの大きい浴槽
の隅まで寄せられる



カーブの大きさを
使い分け!



昔ながらのカーブ
の小さい浴槽にも

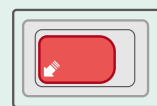

おく楽シリーズ共通特長

1

おくだけ簡単設置

自重で沈むのでお湯をはった後でも設置可能です。




洗い場にも設置できます。



2

外周スロープ形状でつまずき、めくれを防止

すり足歩行の人でも安心。

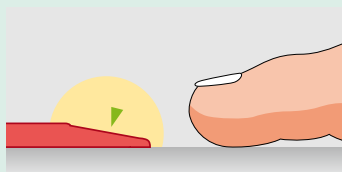



※カット前

3

長さをカットできます


浴槽台との併用時に
おすすめ。

カットライン

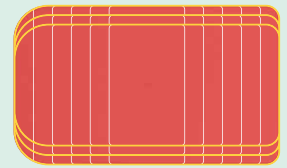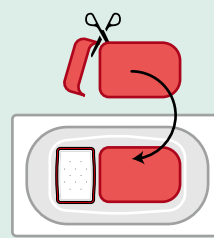

カットラインを設けることで
目印となり、奥行と幅の調節が簡単。

商品寸法図(単位:cm)

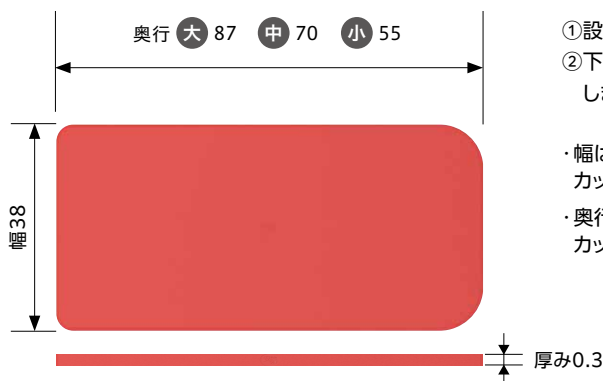


マットをカットする場合

マットをカットして使用する場合は、下図の条件に従って裏面のカットラインに沿ってカットしてください。

- ①設置する浴槽のカーブ形状に合わせて、マットのカーブの形状を決めます。
- ②下図のように基準となるカーブの方向からサイズを決め、カットラインに沿ってカットします。

- ・幅は3cmピッチでカットできます。
- ・奥行は5.5cmピッチでカットできます。

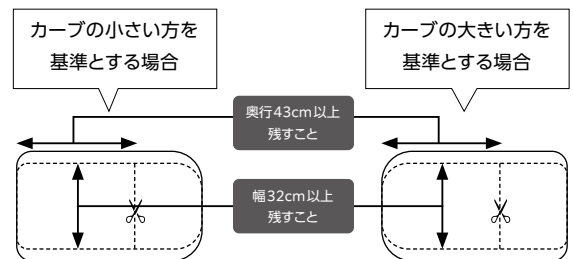

《使用できない浴室環境》

- 木製、天然大理石の浴槽 ○タイル敷き、小石敷きの洗い場、および浴槽 ○お湯が循環している浴槽(24時間風呂)
- ホーローの浴槽 ○入浴剤入りのお湯が入った浴槽 ○泡の出る浴槽 ○温泉 ○大浴場 ○自動洗浄機能付浴槽

おく楽すべり止めマット KP

サイズ	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	梱包入数	JAN	価格
小	レッド ブルー グリーン	535-242 535-243 535-244	幅38×奥行55× 厚み0.3cm	約1.0kg	エラストマー (防カビ加工)	6	289723 289747 289914	5,500円 (税込6,050円)
中	レッド ブルー グリーン	535-245 535-246 535-247	幅38×奥行70× 厚み0.3cm	約1.3kg			289938 289945 289952	6,000円 (税込6,600円)
大	レッド ブルー グリーン	535-248 535-249 535-250	幅38×奥行87× 厚み0.3cm	約1.6kg			289969 289983 290002	7,000円 (税込7,700円)

JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。

浴槽内・洗い場兼用

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。



公式ホームページ
アロン化成【安楽】



公式チャンネル
アロン化成【安楽】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…