

OneAid
YouTube



「松本秀樹のいぬ Tuber」にて
リラクッションをご紹介いただきました



ワンエイド アロン化成

検索

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
※個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

 TOAGOSEI グループ

 **アロン化成株式会社**

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番6号
(住友不動産日比谷ビル8階)

TEL:(03)6891-6053 FAX:(03)3502-1452

URL:<https://www.aronkasei.co.jp>


OneAid
ワンエイド



あなたの笑顔をもう一度みたい
あなたの寝顔を安心してみたい
もう一度、自分のチカラで
立てる、食べられるをサポートする
姿勢サポートクッションで
家族の笑顔もサポートします



L size

ビーグル 15キロ
A:21cm/B:34cm/C:24cm

もう一度、
自分でごはんを
食べられたよ



S size

チワワ 2.5キロ
A:12cm/B:20cm/C:13cm

スヤスヤと
眠れる時間が
こんなにも
安らげるなんて



DM size

パピヨン 2.8キロ
A:13cm/B:22cm/C:12cm

この目の高さで

家族みんなを

眺めるのが

好きなんだ



M size

トイ・プードル 5キロ
A:21cm/B:22cm/C:15cm

ボクにとって

伏せをキープ

できる姿勢は

大切なんだ



DL size

ジャック・ラッセル・テリア 5.4キロ
A:18cm/B:26cm/C:18cm

DM size

ジャック・ラッセル・テリア
5.6キロ
A:15cm
B:28cm
C:20cm



DM size
パピヨン
4キロ
A:14cm
B:24cm
C:16cm



DM size

ベキニーズ
6.4キロ
A:12cm
B:27cm
C:17cm



DM size
ミニチュア・ダックスフンド
3.3キロ A:13cm B:25cm C:20cm



S size
チワワ
2.9キロ
A:13cm
B:21cm
C:10cm



DM size

トイ・プードル
3.7キロ
A:14cm
B:23cm
C:16cm



DM size

ジャック・ラッセル・テリア
2.7キロ
A:13cm
B:20cm
C:13cm



DM size

シーズー
6.2キロ
A:13cm
B:36cm
C:13cm



DL size
アメリカン・コッカー・
スパニエル
7.9キロ
A:18cm
B:28cm
C:14cm

DL size

トイ・プードル
3.3キロ
A:20cm
B:20cm
C:12cm



M size

アメリカン・
コッカー・
スパニエル
8.3キロ
A:20cm
B:32cm
C:18cm



S size

チワワ
2.3キロ
A:12cm
B:19cm
C:11cm



S size

ヨークシャー・
テリア
2.2キロ
A:13cm
B:19cm
C:12cm



DM size

チワワ
2.9キロ
A:11cm
B:20cm
C:11cm



DL size

ウェストハイランド・
ホワイトテリア
7キロ
A:17cm
B:30cm
C:23cm



DL size


ジャック・ラッセル・テリア
6キロ
A:18cm B:34cm C:26cm




□クッション使用の効果

立位保持が簡単にでき介助がラクに
立位で食事ができるので誤嚥の予防に
寝たきり予防で床ずれ防止に
元気な頃の立位目線でリラックス効果も

□クッション選定の目安

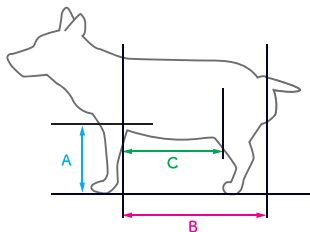

□カラー

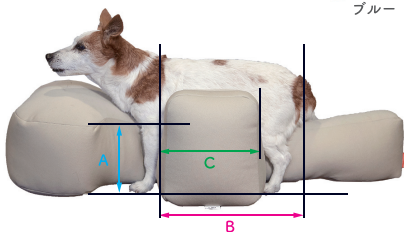

□サイズ価格表

サイズ	S	DM	M	DL	L
価格(税込)	12,100円	20,900円	23,100円	27,500円	31,900円
主な対象犬	小型犬	小型短足犬	中型犬	中大型短足犬	中大型犬
体重(目安)	~3kg	~5kg	~11kg	~11kg	~20kg
胸部高さ(A)	9cm~	10cm~	20cm~	14cm~	24cm~
胴体長さ(B)	~36cm	~40cm	~40cm	~55cm	~55cm
胴体長さ(C)	13cm~	20cm~	23cm~	22cm~	22cm~

※胸部高さ(A)が記載寸法より短い場合や、胴体長さ(B)が記載寸法より長い場合は、安全のためご使用をお控えください。
(転倒し怪我をする恐れがあります)

□ご使用方法

クッションのサイド部の前方に前脚を、後方が後脚になるように
犬をのせてください。



□カスタマイズ方法

脚が長く高さが足りない場合は、
タオル等で調整してください。



□お手入れ方法

表面が汚れた場合は、きれいな布で、水もしくは、中性洗剤などで汚れを拭きとり、乾いた布で十分拭きとってください。
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。

□撮影に協力してくれたモデル犬

る~さ~(ジャック・ラッセル・テリア/9歳) LUCU(ジャック・ラッセル・テリア/13歳)
ウニ(ジャック・ラッセル・テリア/11歳) ジュリ(ジャック・ラッセル・テリア/13歳)
サラ(ジャック・ラッセル・テリア/12歳) ビゲ(ジャック・ラッセル・テリア/17歳)
マロ(トイ・プードル/16歳) ジェシカ(トイ・プードル/12歳) モカ(トイ・プードル/15歳)
ルゥース(チワワ/2歳) ルル(チワワ/7歳) メリィ(チワワ/12歳) ショパン(チワワ/4歳)
空(アメリカン・コッカー・スパニエル/8歳) ヒオナ(アメリカン・コッカー・スパニエル/5歳)
結(パピヨン/6歳) 彩(パピヨン/2歳) ひまり(ヨークシャー・テリア/3歳) うみ(ミックス/7歳)
華(ビーグル/13歳) もっち(ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア/16歳) 詩紋(シー・ズー/11歳)
レオ(ペキニーズ/8歳) マリー(ミニチュア・ダックスフンド/18歳) ぐらたん(ミックス/1歳)

□staff

企画・制作:ぐらんわん!編集部 Photographer:KAI HIRATA Art Director:MAYUMI NAKAMURA